

signia

Life sounds brilliant.

RATGEBER HÖRGERÄTE UND ZUBEHÖR

BLUETOOTH



Vernetzung mit der Welt.

Bleiben Sie mit Leichtigkeit in Verbindung: verbinden Sie Ihre Signia Hörgeräte mit Ihrem TV und vielen weiteren Geräten.



Verbinden Sie sich und Ihre Signia Hörgeräte mit der Welt.

Wussten Sie, dass Ihr Gehör eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie Sie mit Ihrer Umwelt agieren? Gutes Hören ist mit das Wichtigste in unserem Leben. Sich mit Freunden unterhalten, die Geräusche der Natur zu hören oder Musik zu genießen – all das scheint selbstverständlich. Wenn ein Hörverlust auftritt, schränkt er Ihr natürliches Hörerlebnis ein – da ist ein Hörgerät eine echte Hilfe.

Die eleganten und hochmodernen Hörgeräte von Signia ermöglichen ein erstklassiges Hörerlebnis. Die technisch hochanspruchsvollen Hörgeräte bieten eine Kombination aus Spitzentechnologie und modernem Design, stellen sich auf verschiedene Hörsituationen ein und ermöglichen dank modernster Bluetooth®-Technologie zudem eine direkte Übertragung von Telefongesprächen, Musik und TV-Ton.

Erstklassiges Hören und beste Bluetooth-Konnektivität: durch die Hörgeräte von Signia mit Leichtigkeit in Verbindung bleiben.





1 Die Hörgeräte von Signia.

Bestens verbunden.

Dank Bluetooth-Konnektivität.

6-9

2 Fernsehhör Genuss mit StreamLine TV.

Fernsehen mit Ihren Hörgeräten.

10-11

3 Einfaches Übertragen von Telefonaten und Musik.

Egal welcher Typ Sie sind.


12-13





4 Diskrete Steuerung.
Die Signia App.
14-15

5 Mit jedem Smartphone in Verbindung bleiben.
StreamLine Mic machts möglich.
16-17

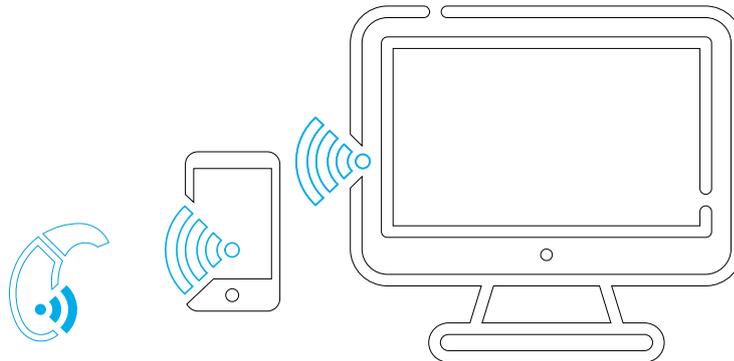

6 Anschluss und Einrichtung leicht erklärt.

StreamLine TV

Anschluss an TV & Hörgerät.
18-19

Kopplung mit iOS iPhone

Verbindung von Hörgeräten und iOS iPhone.
20-21

StreamLine Mic

Kopplung mit Hörgeräten.
22-23

Verbindung mit Android Smartphone.
24-25




reddot design award
winner 2019



Die Hörgeräte von Signia.

In über 140 Jahren Tradition entwickeln wir Hörgeräte, die Ihr Hörvermögen bestmöglich wiederherstellen. 500 Forscher und Entwickler arbeiten praktisch rund um die Uhr für Sie an zwei Entwicklungsstandorten: in Erlangen und Singapur.

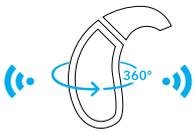

Führend in der Audiologie

Für die meisten Menschen mit Hörminderung ist das Hören besonders schwierig, wenn Störgeräusche in der Umgebung vorhanden sind oder mehrere Menschen gleichzeitig sprechen.

Unsere Hörgeräte leisten in anspruchsvollen Hörsituationen Außergewöhnliches.

Durch die einzigartige e2e wireless-Technologie sind sie drahtlos miteinander verbunden und in der Lage komplexe Audiodaten zwischen den beiden Hörgeräten eines Gerätepaars auszutauschen. So können sich die Hörgeräte zielgerichtet auf einen Gesprächspartner fokussieren, ob zur Seite, nach hinten oder nach vorne. Das kann beispielsweise bei einer Autofahrt besonders wichtig sein, wenn man sich im Gespräch nicht direkt ansehen kann, oder beim Spaziergehen.

Für diese bahnbrechende Entwicklung haben unsere Ingenieure, zusammen mit Forschern der Universität Oldenburg, 2012 den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation erhalten.



Wegweisend in Design

Auch bei Hörgeräten darf auf diskretes und attraktives Design Wert gelegt werden. Elegante Formen, anmutige Konturen, präzise Passformen und hochwertigste Materialien zeichnen unsere Design-Entwicklungen aus. Das „**Styletto Design**“, dreifach für einzigartiges Produktdesign ausgezeichnet, verwandelt das Image von klassischen Hörgeräten zu styli-scher Hearwear. Geschaffen für höchste Ansprüche an Design und Tragekomfort sind diese schlanken Hörgeräte der perfekte Begleiter für einen stilvollen Auftritt.



Vorreiter in der Akkutechnologie

Um die Klangqualität auch in schwierigen akustischen Situationen auf Spitzenniveau zu halten, verarbeiten Hörgeräte die akustische Umgebung mit einer Vielzahl von Funktionen. Dazu wird natürlich Energie benötigt. Besonders komfortabel sind deshalb Hörgeräte, die keinen Batteriewechsel mehr erfordern. Mit Lithium-Ionen-Akkutechnologie ist die Handhabung besonders komfortabel.

Durch die längste Erfahrung in der Entwicklung der Akkutechnologie bieten wir die größte Auswahl an Hörgeräten mit Lithium-Ionen-Akku.

Nachts aufladen und tagsüber hören – so einfach kann die Nutzung von Hörgeräten sein.



Styletto X



Pure 312 X



Pure Charge&Go X



Pure 13 Nx



Motion 13 Nx



Motion Charge&Go Nx



Motion 13 P Nx



Insio Nx ITC/ITE

Bestens verbunden.

Dank Bluetooth-Konnektivität.

Um Elektronikgeräte ohne Kabel miteinander zu verbinden, eignet sich Bluetooth besonders gut. Es lassen sich Daten wie Musik oder Sprache übertragen. Die Sendeleistung der äußerst stabilen Funkstrahlen ist bei Bluetooth-Hörgeräten sehr gering, sodass das Tragen eines Bluetooth-Hörgeräts unmittelbar am Kopf unbedenklich ist. Um genau zu sein, haben Bluetooth-Hörgeräte 10.000 Mal weniger Strahlung als Handys.

Hörgeräte mit Bluetooth-Funktion bieten unzählige Möglichkeiten, sich kabellos mit der Welt zu vernetzen (Konnektivität: Vernetzungsfähigkeit).

Fernsehen, ganz entspannt:

Mit Bluetooth erreicht der TV-Ton Ihre Hörgeräte direkt und störungsfrei. Die Lautstärke bestimmen Sie dabei ganz individuell. Sie benötigen nicht einmal ein Smartphone dafür, ein kleiner Sender am Fernseher genügt.

Telefonate werden vom Smartphone in die Hörgeräte gesendet, ohne die störenden Umgebungsgeräusche zu übertragen. Und mit beiden Ohren fällt das Verstehen wesentlich leichter.

Falls Sie gerne YouTube, Spotify, Amazon Music usw. nutzen, auch **Musik** kann in die Hörgeräte übertragen werden – aus dem Internet oder direkt vom Smartphone. So werden Ihre Hörgeräte zu Stereo-Bluetooth-Kopfhörern.

Den **Streaming-Möglichkeiten** sind kaum Grenzen gesetzt. Ob Navigationsansagen, Übersetzungs-Apps oder die Nutzung von anderen Diensten mit Sprachsignalen, Sie hören die Informationen stets direkt in Ihren Hörgeräten.

Unsere Bluetooth-fähigen Hörgeräte sind von Apple Made for iPhone zertifiziert. Doch auch mit anderen Geräten, wie Android-Smartphones oder Tablets, profitieren Sie von der Bluetooth Streaming-Technologie. Mit einem kleinen Ansteckgerät ist die kabellose Übertragung in Ihre Hörgeräte in der gleichen exzellenten Klangqualität möglich.





Fernsehhör Genuss mit StreamLine TV.

**Fernsehen mit Ihren Hörgeräten.
Genießen Sie eine erstklassige TV-Ton Übertragung.**

Sie wollen Ihren Lieblingsfilm oder die Nachrichten in erstklassiger Qualität hören, ohne dass die Lautstärke des Fernsehers erheblich aufgedreht werden muss?

StreamLine TV verbindet Ihre Hörgeräte kabellos mit Ihrem TV. Dabei wird der TV-Ton direkt in die Hörgeräte übertragen, sodass Sie erstklassige Tonqualität in Dolby Digital-Qualität genießen.

Der mit jedem TV und Bluetooth-fähigen Signia Hörgerät kompatible Sender überträgt den TV-Ton direkt in beide Hörgeräte - ganz ohne Zusatzgerät. StreamLine TV ermöglicht zudem gleichzeitiges Streaming an mehrere Hörgeräte, sodass Sie unbeschwert gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern, die Hörgeräte tragen, fernsehen können.

Darüber hinaus haben Anrufe stets Vorrang. Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird die Übertragung des TV-Tons angehalten. Auf diese Weise können Sie einen Anruf annehmen, während Sie fernsehen, wobei die Übertragung des TV-Tons automatisch angehalten wird.

Um die Vorteile von StreamLine TV nutzen zu können, muss Ihr Hörgerät mit StreamLine TV einmalig gekoppelt werden. Erfahren Sie mehr über die vollautomatische Kopplung von Hörgeräten und StreamLine TV auf Seite 18.

Highlights von StreamLine TV.


- ⊙ Direkte Übertragung des TV-Tons in die Hörgeräte.
- ⊙ Auch ohne Smartphone nutzbar.
- ⊙ Drahtlose Verbindung bis zu 10m.
- ⊙ Gleichzeitiges Streaming an mehrere Hörgeräte mit einem StreamLine TV.
- ⊙ Tonqualität in Dolby Digital.
- ⊙ Kompatibel mit jedem TV-Gerät.
- ⊙ Separates Einstellen der Lautstärke.
- ⊙ Leichte Bedienung mit der Signia App.

Einfaches Übertragen von Telefonaten und Musik.

Verbinden Sie Ihre Signia Hörgeräte mit Ihrem Smartphone und anderen Geräten.

Sie möchten telefonieren und Musik hören, ohne dass dies zu einer Herausforderung im Alltag wird?

Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik und Telefonate in bester Stereo-Qualität direkt in die Hörgeräte. Nehmen Sie einen Anruf mit nur einem Klick entgegen oder hören Sie den schnellsten Weg zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten aus Ihrer Navigations-App. Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone.

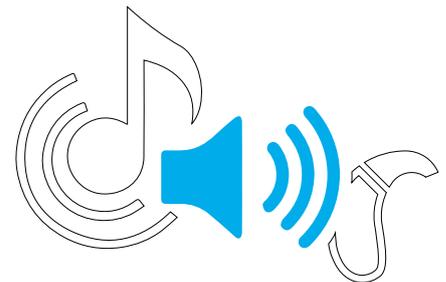

Egal welcher Typ Sie sind!

Sie besitzen ein iPhone?


Durch einfaches Koppeln, intuitive Bedienung und hohe Energieeffizienz über das spezielle "Bluetooth Low Energy"-Protokoll werden Ihre Hörgeräte zu kabellosen Stereo-Headsets.

Mit Bluetooth-fähigen Hörgeräten können Sie die Klänge von Ihrem iPhone oder iPad klarer hören. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Made for iPhone Hörgerät mit Ihrem iOS-Gerät verbinden, steuern und vieles mehr auf Seite 20.



Sie nutzen ein anderes Smartphone?

Bei Android-Geräten beispielsweise ermöglicht ein kleines Zusatzgerät „StreamLine Mic“ die Übertragung in die Hörgeräte. Telefonate, Musik und andere Audioquellen werden von jedem Bluetooth-fähigen Gerät in exzellentem Stereo-Klang in beide Hörgeräte übertragen – unabhängig von Ihrem Betriebssystem. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Hörgerät mit Ihrem Android-Gerät verbinden, steuern und vieles mehr auf Seite 24.

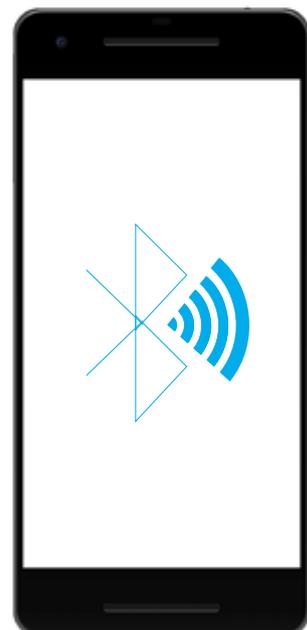

Diskrete Steuerung. Die Signia App.


Ob Hörgeräte mit oder ohne Bluetooth-Funktion, die Signia App ist immer die richtige Wahl.

Unterwegs die Lautstärke oder die Hörprogramme ändern? Dank der Signia App ganz diskret möglich.

Zudem macht der große Bildschirm die Bedienung besonders einfach und komfortabel.




Die App ist kompatibel mit Android und iOS. Der Download im Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

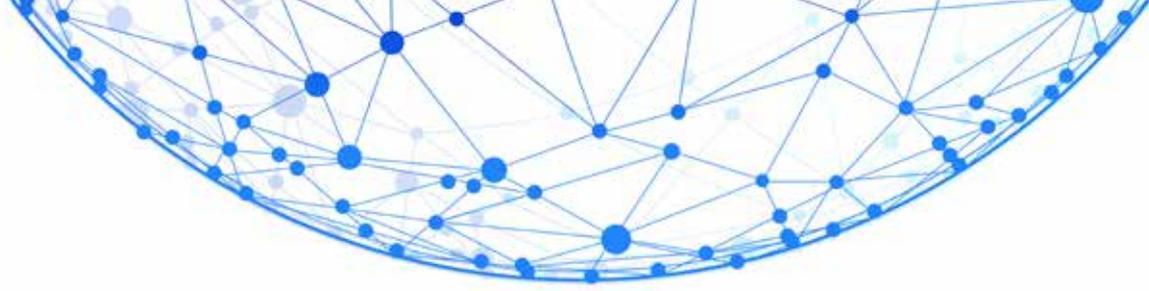

Nutzen Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung.

Mit der Signia App lassen sich Ihre Hörgeräte ganz einfach fernbedienen. Sie können jederzeit individuelle Einstellungen vornehmen oder den Batteriestand auslesen.

Genießen Sie die Vorteile der Signia App in unterschiedlichen Hörsituationen: Nehmen Sie Voreinstellungen für bestimmte Hörumgebungen wie z.B. Café, Kino oder für Gespräche vor und widmen sich uneingeschränkt den Dingen im Leben, die Ihnen Spaß machen!

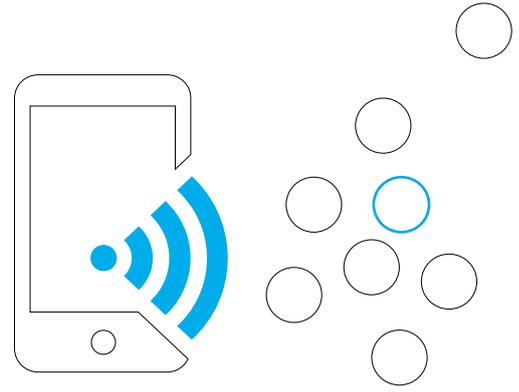


Nutzen Sie die App zum Vernetzen.

Einfach auf Ihr Smartphone tippen und den Fernsehton aktivieren, die Streaming-Lautstärke einstellen oder Einstellungen bei Ihrem StreamLine Mic vornehmen. Immer in Verbindung bleiben, mit der Signia App.



Noch besser mit Ihrem Hörakustiker verbunden.

Sie haben eine Frage oder brauchen einen Rat? Kontaktieren Sie über die Signia App einfach Ihren Hörakustiker via Telefonanruf oder Chat. Sie können einen Folgetermin unerwartet nicht wahrnehmen? Kein Problem: Ihr Hörakustiker kann sich einfach über das Smartphone mit Ihren Hörgeräten verbinden und auf diesem Weg bequem Anpassungen vornehmen.

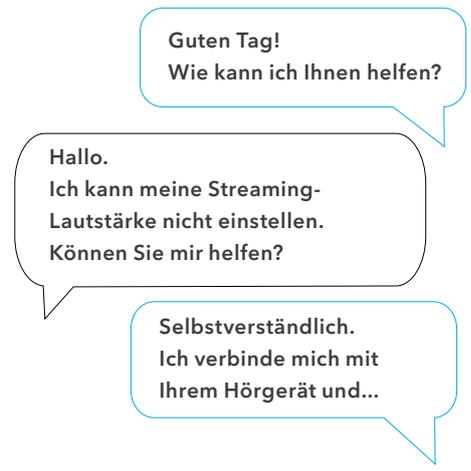

Mit jedem Smartphone in Verbindung bleiben.

**StreamLine Mic machts möglich.
Hands-free Telefonie, Musik und mehr in bester Stereo-Qualität.**

Für **Hands-free Telefonie** können Sie Anrufe mit dem StreamLine Mic annehmen, ohne ihr Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen. Dabei haben Telefonate immer Vorrang, andere Streaming-Aktivitäten werden während des Telefongesprächs automatisch unterbrochen und im Anschluss selbständig fortgeführt. Auch wenn Sie mit dem StreamLine TV den Fernsehton in Ihre Hörgeräte übertragen, müssen Sie den Fernseher nicht erst manuell ausschalten.

Besseres Sprachverstehen im Störlärm: Mit dem StreamLine Mic können Sie in lauter Umgebung und über eine Distanz von bis zu 20 Metern die Stimme eines Sprechers direkt in beide Hörgeräte übertragen. Platzieren Sie das StreamLine Mic z.B. bei einem Vortrag oder Theaterstück an der Bühne und der Ton wird direkt in Ihre Hörgeräte übertragen. Dadurch hört es sich für Sie an, als würde der Sprechende unmittelbar neben Ihnen stehen.

Um die Vorteile von StreamLine Mic nutzen zu können, muss Ihr Hörgerät mit StreamLine Mic einmalig gekoppelt werden. Erfahren Sie mehr über die vollautomatische Kopplung von Hörgeräten und StreamLine Mic auf Seite 22.





Highlights von StreamLine Mic

- ⊙ Hands-free Telefonie.
- ⊙ Kabelloses Direct-Streaming - Telefonate, Musik und andere Audioquellen in exzellentem Stereo-Klang in beide Hörgeräte übertragen.
- ⊙ Egal welches Smartphone Sie besitzen.
- ⊙ Fernmikrofon - in lauter Umgebung und über eine Distanz von bis zu 20 Metern besseres Sprachverstehen.
- ⊙ Fernbedienung - komfortable Lautstärke-regulierung direkt über Tasten oder das Smartphone.

StreamLine TV

Anschluss an TV & Hörgerät.

Verbinden Sie StreamLine TV mit Ihren Hörgeräten
in drei einfachen Schritten.

1. StreamLine TV einschalten.
2. Hörgerät aus- und einschalten.
3. Platzieren Sie beide Hörgeräte auf dem StreamLine TV.

Der Kopplungsprozess beginnt automatisch.
Sobald die Kopplung abgeschlossen ist,
leuchten beide LED-Anzeigen für ca. 30 Sekunden blau. ■

Das Koppeln muss nur einmal durchgeführt werden.
StreamLine TV kann mit mehreren Hörgeräten gekoppelt werden.

Intuitive LED-Anzeige.

Leistungsanzeige
und TV Statusanzeige.



Weißer Leistungsanzeige.
StreamLine TV startet.



Beide Anzeigen blinken blau.
StreamLine TV ist angeschaltet.
Das Hörgerät wird gesucht.



Beide Anzeigen leuchten für ca. 30 Sekunden blau.
Das Pairing ist abgeschlossen.



Beide Anzeigen leuchten grün.
StreamLine TV empfängt ein Audiosignal
über den Cinch-Anschluss.



Grüne Stromanzeige und eine blinkende grüne Statusanzeige.
StreamLine TV empfängt kein Audiosignal
über den Cinch-Anschluss oder die Lautstärke ist zu niedrig.



Grüne Stromanzeige und eine blinkende rote Statusanzeige.
Das Signalformat wird nicht unterstützt.



Rote Leistungsanzeige.
StreamLine TV ist eingeschaltet, empfängt
aber kein Audiosignal.




Beide Anzeigen blinken rot.
Fehler. Bitte kontaktieren
Sie Ihren Hörakustiker.



Hinweis:

StreamLine TV muss immer aktiviert werden, um den TV-Ton zu übertragen. Ohne Smartphone kann die Aktivierung direkt am Hörgerät, über den Wipptaster vorgenommen werden.

Ihr Hörakustiker programmiert den Wipptaster entsprechend. Mit dem Smartphone kann StreamLine TV auch über die Signia App aktiviert werden.

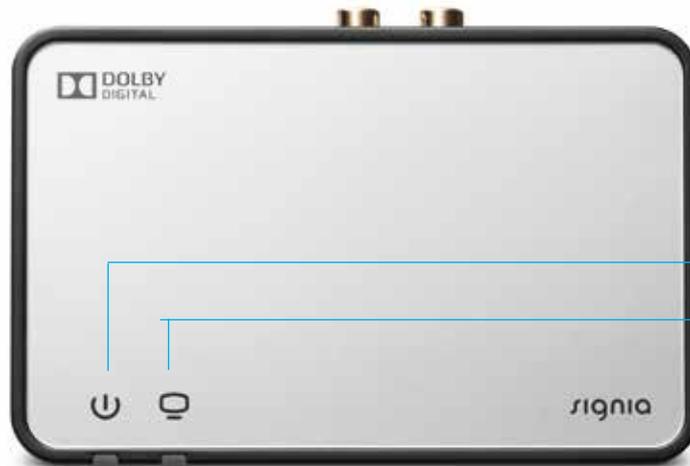

Leistungsanzeige
TV-Statusanzeige



**Setup-Knopf
"Einrichten"**

Halten Sie den Setup-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht.
Beide Anzeigen blinken blau.

Netzteil


Cinch-Anschlüsse

Toslink-Anschlüsse
optisch

Mode-Knopf

Anzeige Firmware
(nur für Hörakustiker)

StreamLine TV ist mit allen Fernsehern mit einem der folgenden Anschlüsse kompatibel.

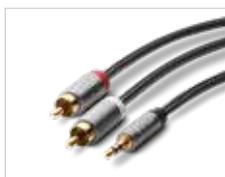

TOSLINK KABEL (optisch/digital) · Cinch Kabel (RCA / analog) · Klinkenadapter



Kopplung mit iOS iPhone.

Verbindung von Hörgeräten und iOS iPhone
in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Das Hörgerät aus- und wieder anschalten.

Schritt 2

Suchen Sie Ihre Hörgeräte unter
Einstellungen / Bedienungshilfen /
Hörhilfen.

Schritt 2a



Schritt 2b





Um die Bluetooth-fähigen Signia Hörgeräte mit den iOS kompatiblen Geräten nutzen zu können, müssen diese einmalig miteinander verbunden werden.

Schritt 3

Sind die Hörgeräte richtig erkannt, können diese über das Antippen des Eintrags "...s Hörsystem" gekoppelt werden. Bei zwei Hörgeräten darauf achten, dass **(R+L)** angezeigt wird.

Schritt 4

Für jedes Hörgerät ist eine Kopplungsanforderung mit **Koppeln** zu bestätigen.

Schritt 3



Schritt 4



StreamLine Mic Kopplung mit Hörgeräten.

Verbinden Sie StreamLine Mic mit Ihren Hörgeräten
in drei einfachen Schritten.

1. StreamLine Mic aus- und wieder einschalten.
2. Das Hörgerät aus- und wieder anschalten.
3. Platzieren Sie beide Hörgeräte in der Nähe des StreamLine Mic.
Maximale Entfernung: 20 cm.

Der Kopplungsprozess beginnt automatisch.
Sobald die Kopplung abgeschlossen ist,
leuchtet die Status-Anzeige gelb. ■

Hinweis:

Die Kopplung muss nur ein einziges Mal durchgeführt werden. Hierauf wird die Verbindung gespeichert und erfolgt daraufhin immer unmittelbar beim Einschalten des Hörgeräts.




Vollautomatische Kopplung mit Hörgeräten.



Power-Anzeige

-  **Orange.**
Ladevorgang (Gerät ist ausgeschaltet).
-  **Blinkt orange.**
Der Ladevorgang ist abgeschlossen und StreamLine Mic ist ausgeschaltet.
-  **Blinkt grün.**
Ladevorgang (Gerät ist eingeschaltet).

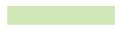-  **Grün.**
Gerät ist eingeschaltet, es läuft kein Ladevorgang.
-  **Grün erlischt.**
Der Ladevorgang ist abgeschlossen und StreamLine Mic ist eingeschaltet.
-  **Rot leuchtet.**
Batterie ist schwach.

Status-Anzeige

-  **Blinkt gelb.**
Suche nach Hörgeräten.
-  **Gelb.**
Ruhemodus.
Ist mit Hörgeräten verbunden.
Ist mit keinem Smartphone oder anderen Geräten verbunden.
-  **Blinkt grün.**
Eingehendes Telefongespräch.
-  **Grün.**
Telefongespräch ist aktiv.
-  **Blinkt blau.**
StreamLine Mic ist für Smartphone sichtbar und bereit zur Kopplung.
-  **Blau.**
Telefonmodus: ist mit einem Smartphone verbunden.
-  **Blinkt magenta.**
Verbindung mit dem Fernmikrofonmodus erstellt.
-  **Magenta.**
Fernmikrofonmodus aktiv.
-  **Orange.**
Audiostreaming ist aktiv (Musik).



Verbindung von StreamLine Mic und **Android Smartphone.**

Nur **fünf einfache Schritte** zur Kopplung.

Schritt 1

Schalten Sie das StreamLine Mic über Halten (ca. 6 Sekunden) der **Multifunktionstaste**  an.

Die grün leuchtende Power-Anzeige und die gelb blinkende Status-Anzeige weisen darauf hin, dass das StreamLine Mic angeschaltet ist, aber kein Hörgerät erkannt wurde.



Schritt 2

Schalten Sie nun Ihre Hörgeräte an und warten Sie, bis die Status-Anzeige dauerhaft gelb leuchtet.



Schritt 3

Halten Sie die Multifunktionstaste  und die Plus-Taste  7 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Status-Anzeige blau blinkt, ist das StreamLine Mic im Kopplungsmodus.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3





Schritt 4

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie nun an Ihrem Smartphone oder Musikabspielgerät "StreamLine Mic" in der Liste der gefundenen Geräte und wählen Sie „Koppeln“ aus.

Hinweis:

Hands-free Telefonie mit StreamLine Mic ist auch mit iOS iPhone möglich. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Hörakustiker.

Schritt 5

Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Status-Anzeige dauerhaft blau.

Schritt 6

Fertig! Telefonieren und Media-Streaming sind nun möglich.

Schritt 4







„Egal wohin mich mein Job führt, ich bin völlig unabhängig und immer verbunden.“

Manuel Cortez.
Schauspieler, Fotograf, Regisseur und Fashion Experte.

www.signia-hoergeraete.de/manuel-cortez/

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc.
Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

„Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an das iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple ist weder für die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts verantwortlich noch dafür, dass es Sicherheitsstandards oder gesetzliche Vorschriften erfüllt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Hersteller

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Deutschland

Kontakt

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Deutschland
Tel.: 0800 0880800

50184-99C2 | Gedruckt in Deutschland |
© 02.2020 Signia GmbH

 facebook.com/SigniaHearingGermany

 youtube.com/signiahearing

signia-hoergeraete.de
signia-hoergeraete.at
signia-hoergeraete.ch