


Signia App

Prise en main rapide

Nécessite IOS 9.3 ou version ultérieure

Nécessite Android 5.0 ou version ultérieure

Présentation de l'application

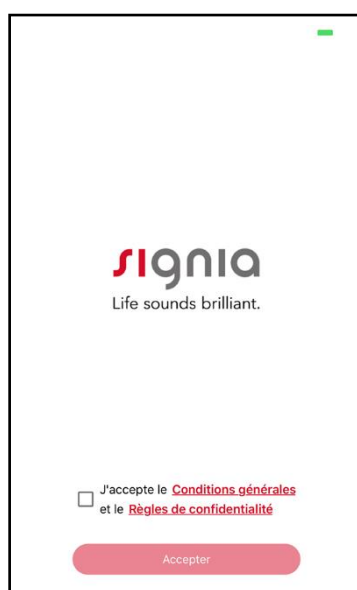


Signia App, la nouvelle application tout en un !

Compatible avec les appareils bx, px, Nx et X.

Avec son interface moderne et intuitive, Signia App est un condensé de touchControl, myControl et myHearing.

Il vous est possible de vous y connecter par Bluetooth, QR Code, code TeleCare ou manuellement. Plus besoin de se demander quelle application choisir.

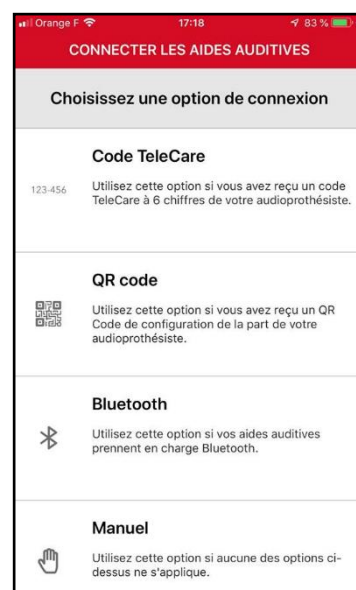



Connexion aux aides auditives via Bluetooth



1 - Allez dans les paramètres de votre smartphone

2 - Allez dans « Général »

3 - Allez dans « Accessibilité »

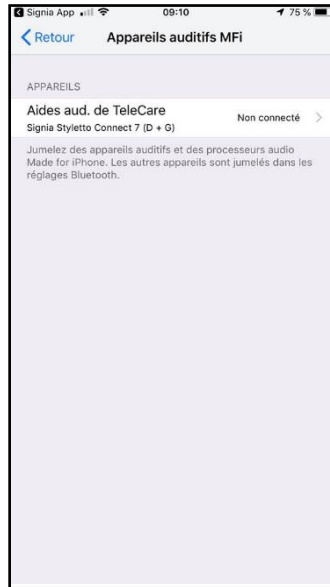
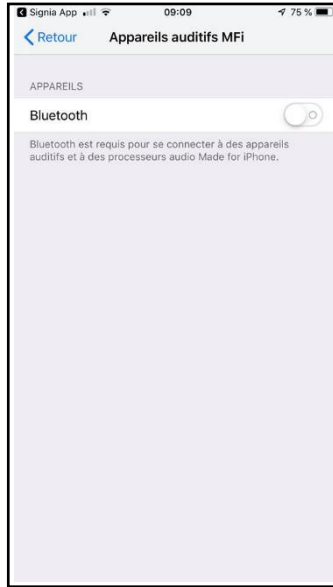


4 - Allez dans « Appareils auditifs MFi »

5 - Activez le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.

6 - Une fois les appareils trouvés, cliquez dessus.

7 - Cliquez sur « Jumeler » (2 fois si stéréo)

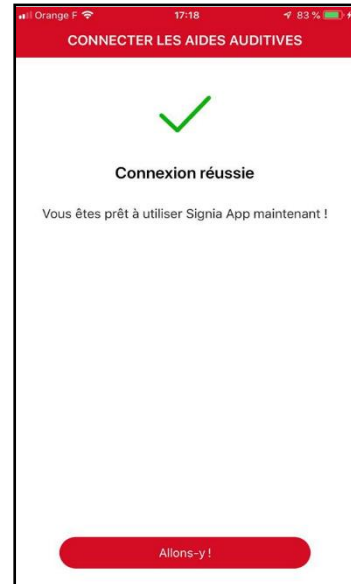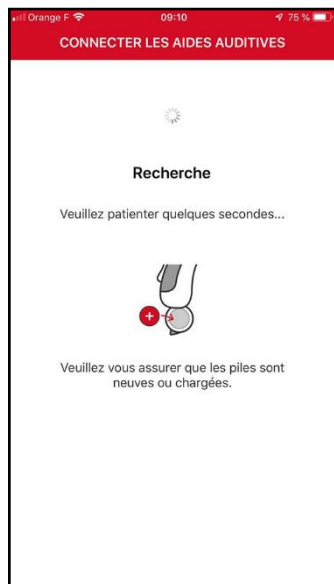





8 - Retournez dans l'application et attendez...

9 - Vous pouvez maintenant démarrer l'expérience Signia App !



Pour Android, il vous suffira d'activer le Bluetooth du téléphone uniquement (passer les étapes de 2 à 7)

Connexion aux aides auditives manuellement

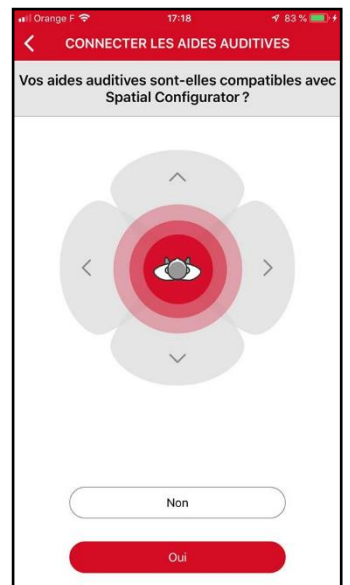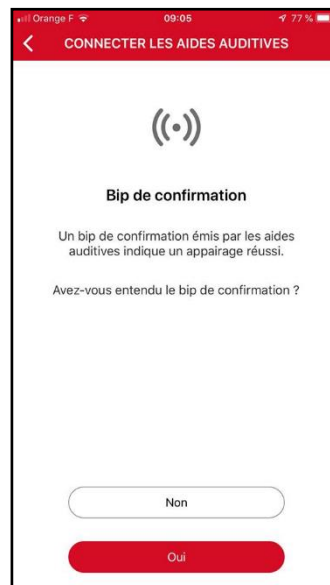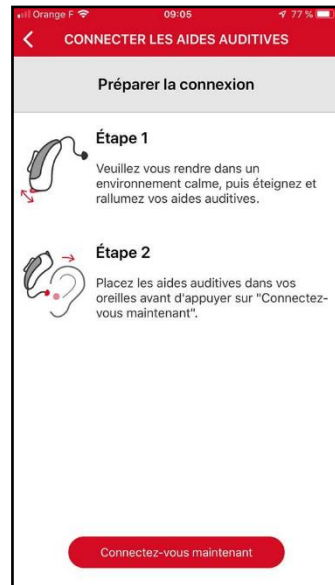
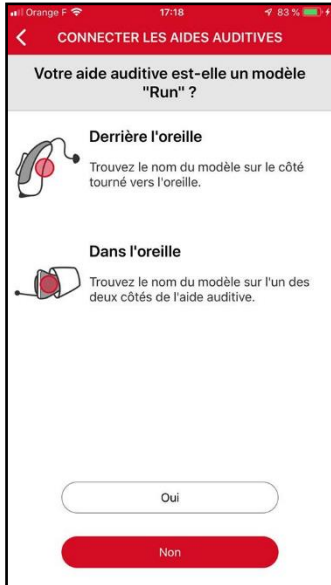


1 – Si ce n'est pas un appareil RUN cliquez sur « non » et inversement.

2 – Cliquez sur « Connectez-vous maintenant ».

3 – Si vous avez entendu un bip dans les appareils, cliquez « Oui », sinon « Non » et le bip sera émis à nouveau.

4 – Si vos appareils sont compatibles Spatial Configurator, cliquez « Oui », sinon « Non ».

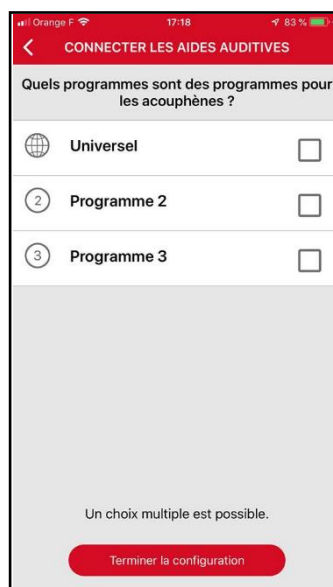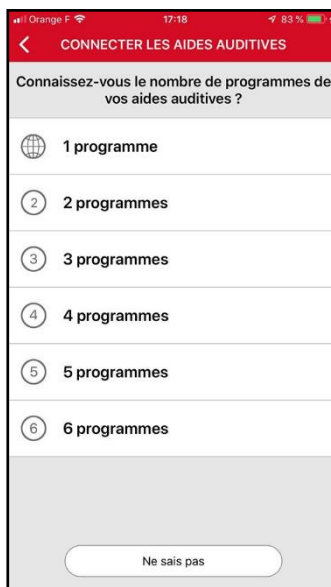


5 – Sélectionnez le nombre de programme dont vos appareils disposent

6 – Si vous possédez un programme Anti-acouphène sélectionnez son numéro, sinon cliquez directement sur « Terminer la configuration ».


7 - Vous pouvez maintenant démarrer l'expérience Signia App !

Connexion aux aides auditives via QR Code

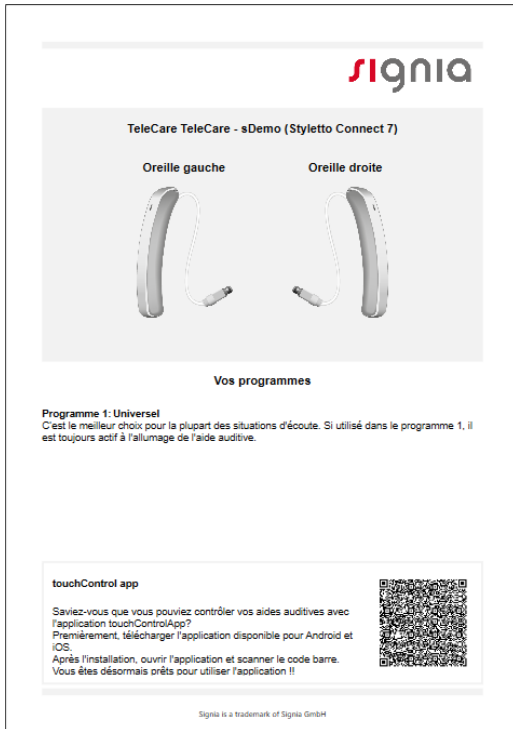


Pour la connexion par QR Code il vous faut scanner le QR Code se trouvant dans le compte rendu de connexion (dernière page).

Une fois celui-ci scanné la connexion se fait automatiquement.

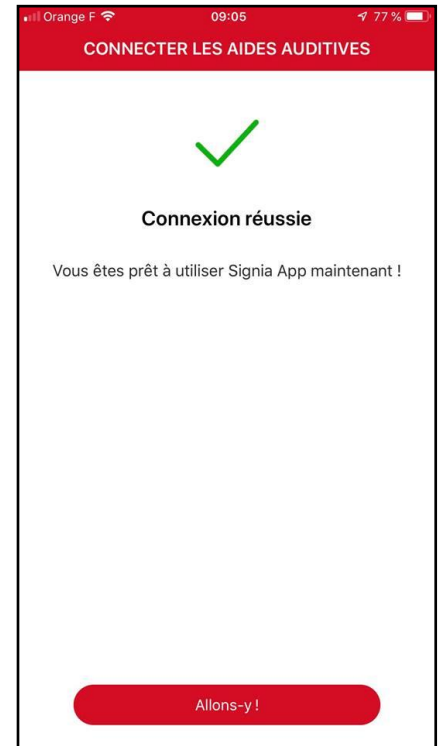


Connexion aux aides auditives via TeleCare

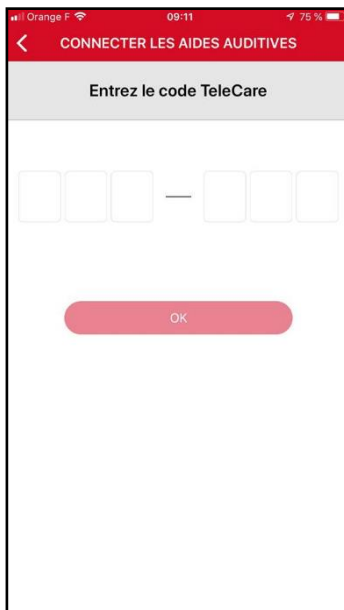


Puis suivre les étapes décrites dans la section « Connexion aux aides auditives via Bluetooth » ou « Connexion aux aides auditives manuellement » en fonction des appareils.

Entrez le code fourni par votre audioprothésiste ou reçu par sms


Télécommande

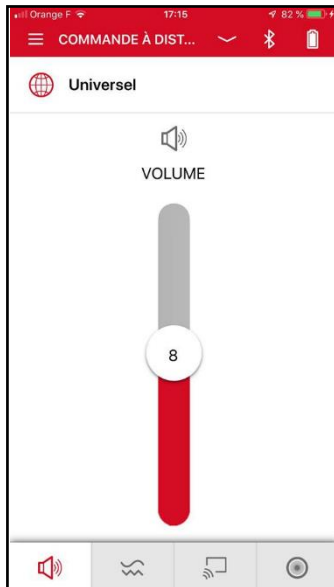

Changement de volume.

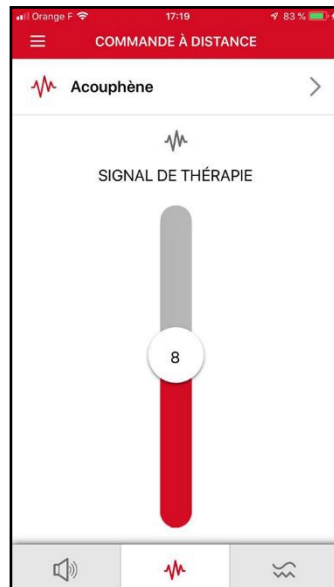


Changement du signal de thérapie.

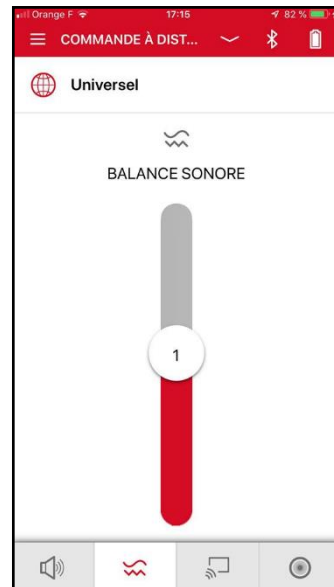


Changement du SoundBalance.




Onglet indiquant si un périphérique est connecté (StreamLine TV, StreamLine Mic ou CROS).

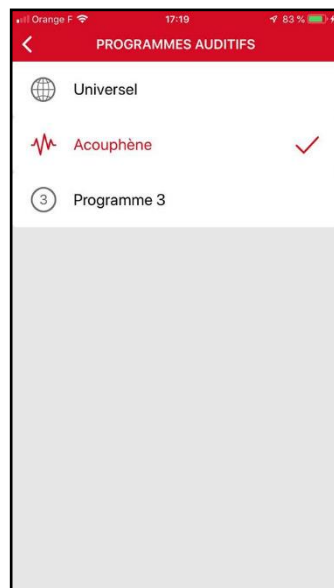


Changement de programme.

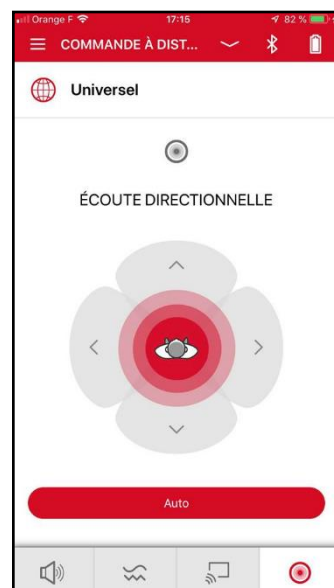

Changement de directivité microphonique. Il est automatiquement en mode « Auto »...

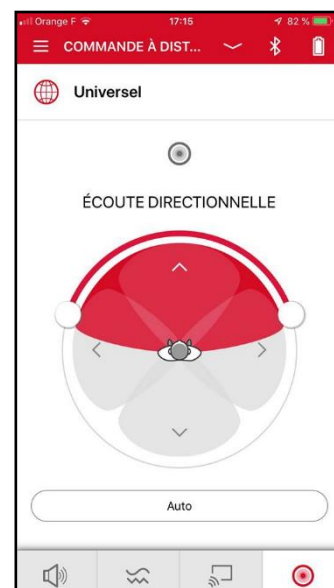

...mais peut être dirigé comme souhaité.

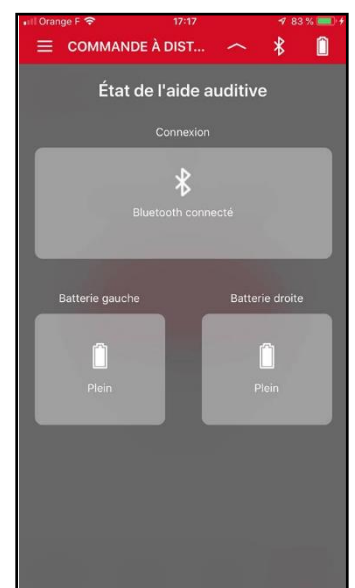


Vous pouvez voir l'état de batterie de vos aides auditives ainsi que l'état de connexion Bluetooth.

Réglages



Menu.

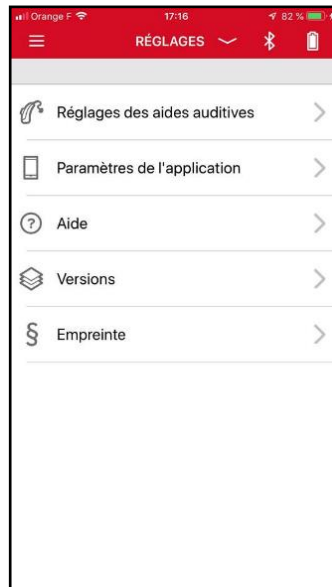

Réglages de l'application, des aides auditives, et informations.




Réglages des aides auditives.




Réglages de l'application.


TeleCare

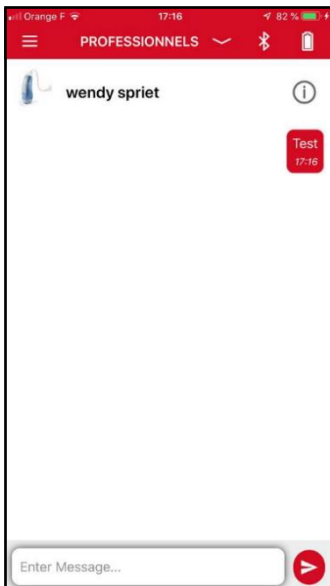

Professionnels : fonction post-it avec votre audioprothésiste.

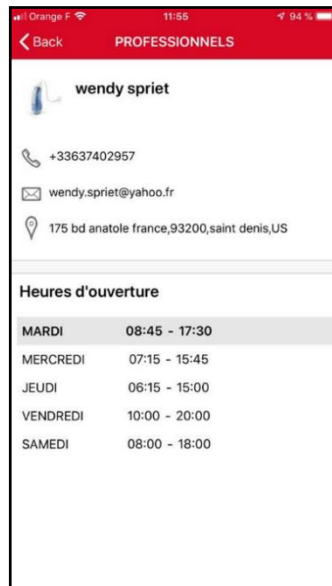

Professionnels : renseignement sur le centre de votre audioprothésiste.

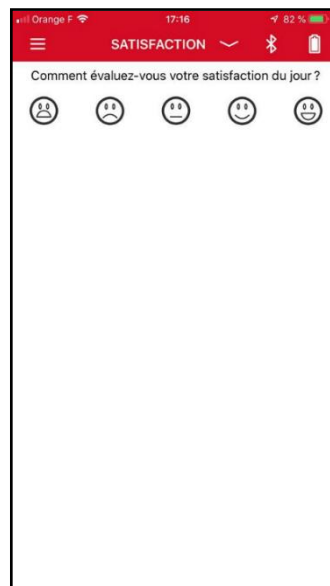

Satisfaction journalière



Satisfaction journalière : si note insatisfaisante (3 premiers smiley)