



## Prise en main rapide : Chargeur à induction II



Voyant éteint : le chargeur n'est pas connecté à l'alimentation secteur ou bien le chargeur à induction II ne contient pas les aides auditives.



Voyant orange clignotant : le chargeur détermine l'état de charge de l'aide auditive avant de commencer la charge.



Voyant orange fixe : état de charge de 0 à 33%



Un voyant vert fixe : état de charge de 34 à 66%



Deux voyants vert fixe : état de charge de 67 à 99%



Trois voyants vert fixe : Les aides auditives sont complètement chargées



Trois voyants orange clignotent successivement : phase de refroidissement. La charge reprend après 5 minutes.



Trois voyants rouge clignotants : **problème appareil auditif**



Trois voyants rouge clignotants successivement : **problème chargeur**