

Indicateur LED du StreamLine TV

- 1 LED "Power"
- 2 LED "Réception du signal"



- Le Transmitter démarre.

Les deux LEDs bleues clignotent, le Transmitter est en mode appairage.

Les deux LEDs bleues s'allument en continu pendant 30 secondes, l'appairage est complet.

- Si la LED 1 est rouge, le StreamLine est allumé mais il n'y a pas de signal audio.

Les deux LEDs vertes sont allumées, le Transmitter reçoit le signal audio via RCA.

La LED 2 verte clignote, le Transmitter ne reçoit pas le signal audio via RCA.

La LED 2 bleue est allumée, le Transmitter reçoit le signal audio via TOSLINK.

La LED 2 rouge clignote, le signal reçu via TOSLINK n'est pas supporté.

Les deux LEDs rouges clignotent, contactez votre audioprothésiste ou le Retour SAV Signia.