



Active, Active Pro

Guide à l'attention des audioprothésistes



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Introduction | 3 |
| Confort de port et anatomie de l'oreille | 4 |
| Appareillage | 6 |
| Assemblage | 6 |
| Activation | 6 |
| Charge | 7 |
| Connexion | 7 |
| À propos du numéro de série | 7 |
| Dépannage | 8 |
| Remplacement du dispositif anti-cérumen | 8 |
| Informations importantes sur la sécurité | 9 |
| Avertissements généraux | 9 |
| Batteries défectueuses | 10 |
| Autres informations | 12 |
| Périodes de stockage | 12 |
| Symboles utilisés dans ce document | 12 |

Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur les aides auditives équipées de batteries (batteries lithium-ion) intégrées de façon permanente.




ATTENTION

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.


Confort de port et anatomie de l'oreille

La meilleure façon de déterminer si Signia Active ou Active Pro convient à l'utilisateur est de se baser sur la taille du pavillon et l'angle du conduit auditif.


- Tout d'abord, le Click Sleeve ou Click Dome doit être d'une taille inférieure à celui que vous choisissez habituellement.

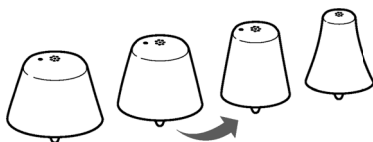

- Le conduit auditif de l'utilisateur doit être plutôt droit. Il ne doit pas s'écarter de cet axe de plus de +/- 35° verticalement (haut/bas) ① et de +/- 10° horizontalement (avant/arrière) ②.

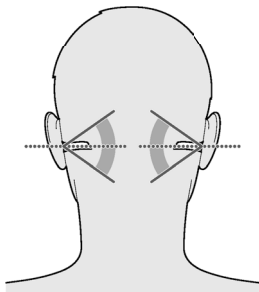


① maximum +/- 35°

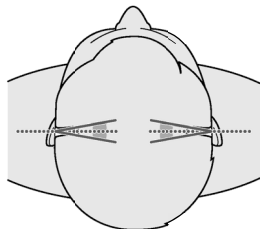



② maximum +/- 10°

- La surface de l'appareil doit être parallèle au côté de la tête, l'ouverture du microphone étant horizontale, et ne doit pas s'écarter de plus de +/- 30°.

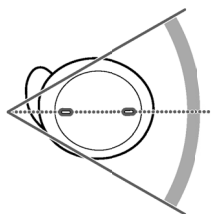

maximum +/- 30°

- Le pavillon (cavum conchae) doit être suffisamment grand pour pouvoir glisser l'appareil Active ou Active Pro facilement derrière l'antitragus (dimensions : ~20 x 16 mm) sans exercer de pression sur l'anthélix ou la racine de l'hélix.

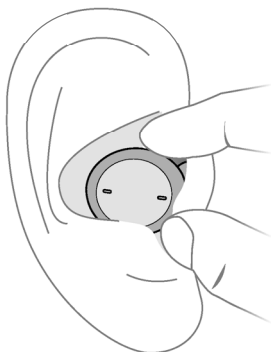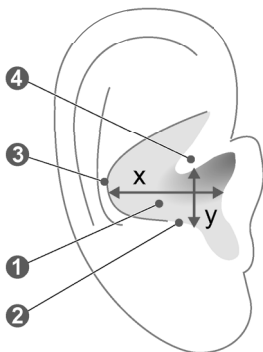

① pavillon (cavum conchae)

③ anthélix

② antitragus

④ racine de l'hélix

Appareillage

Avant de commencer l'appareillage, vous devez préparer les appareils auditifs.

Assemblage

- ▶ Chaque appareil auditif est livré avec une batterie préinstallée. Il n'est donc pas nécessaire d'y insérer de pile.
- ▶ Fixez un embout à l'appareil auditif. L'embout doit être suffisamment grand pour éviter que l'appareil auditif ne glisse lorsque l'utilisateur bouge.



Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, vous devez activer les appareils auditifs. Placez les appareils auditifs dans le chargeur (s'ils n'y sont pas déjà) et appuyez sur le bouton du chargeur jusqu'à ce que le premier voyant vert s'allume.

Remarque :

- Les appareils auditifs qui sont activés, mais **inutilisés**, peuvent se décharger plus vite que des appareils auditifs qui n'ont **pas** été activés. Par conséquent, veillez à n'activer les appareils auditifs qu'en prévision d'une première utilisation ou d'un premier appareillage.

Charge

Chargez les appareils auditifs pendant au moins 15 minutes avant le premier appareillage.

Effectuez une charge complète des appareils auditifs avant la livraison au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.


Conformez-vous aux conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'appareil auditif et du chargeur.

Connexion

Utilisez Noahlink Wireless pour procéder à la programmation sans fil des appareils auditifs.

À propos du numéro de série

Le numéro de série est imprimé à l'arrière de l'appareil.

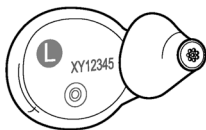


Dépannage

Avant d'envoyer une aide auditive à notre adresse de service après-vente, effectuez un contrôle visuel pour voir si l'écouteur est bloqué par du cérumen. Si tel est le cas, remplacez le dispositif anti-cérumen.

Remplacement du dispositif anti-cérumen

- ▶ Retirez l'embout.
- ▶ Vissez l'extrémité fileté de l'outil de remplacement du dispositif anti-cérumen dans le filtre de l'ouverture de l'écouteur.

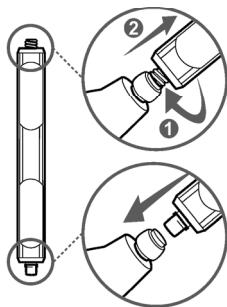

- ▶ Retirez le filtre usagé.
- ▶ Tournez l'outil et mettez le nouveau dispositif anti-cérumen en place.
- ▶ Détachez le filtre en basculant l'outil de remplacement sur le côté. Ensuite, jetez l'outil de remplacement.

Informations importantes sur la sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec les appareils auditifs.



REMARQUE

- ▶ Vous ne devez en aucun cas remplacer les batteries. Cette opération relève exclusivement de la compétence d'un centre d'entretien agréé.

Avertissements généraux



AVERTISSEMENT

L'appareil auditif intègre dès sa sortie d'usine une batterie (batterie rechargeable lithium-ion). Une utilisation incorrecte de la batterie ou de l'appareil auditif peut causer l'explosion de la batterie.

Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion !

- ▶ Suivez les consignes de sécurité concernant les batteries qui sont indiquées dans ce paragraphe.



REMARQUE

- ▶ Pour éviter de polluer l'environnement, ne jetez pas les batteries, les aides auditives ou le chargeur avec les ordures ménagères.
- ▶ Recyclez ou éliminez les batteries, les aides auditives ou le chargeur conformément aux réglementations locales.

Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est défectueuse :

- ▶ Placez les appareils auditifs dans le chargeur. Si un voyant s'allume en rouge, alors la batterie est effectivement défectueuse.
- ▶ Procédez à un examen visuel de l'appareil auditif. Le test est considéré comme non concluant si vous constatez au moins une des conditions ci-dessous :
 - Il y a des signes physiques de déformation, provoquée par le gonflement de la batterie au lithium à l'intérieur de l'appareil auditif.
 - Il y a des traces visibles de fuite émanant de la batterie au lithium.
 - Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au toucher.

Si une seule de ces étapes d'essai révèle une anomalie, vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. Pour des raisons de sécurité, il n'est plus possible d'expédier les appareils auditifs. Par conséquent, veuillez noter le numéro de série de l'appareil auditif, prendre une photo des dommages constatés, puis consulter le service client avant de mettre votre produit au rebut, en respectant la réglementation locale.

Autres informations

Périodes de stockage

Les aides auditives inutilisées se déchargent. Respectez les périodes de stockage suivantes, pour éviter une décharge complète :

- Les aides auditives qui n'ont pas été activées ou utilisées peuvent être stockées jusqu'à 12 mois après la date de fabrication. La date de fabrication est imprimée sur l'étiquette apposée sur l'emballage de l'aide auditive.
- Une fois activée, l'aide auditive doit être chargée au moins tous les 6 mois pour rester en bon état.

Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Made for

iPhone | iPad | iPod

« Made for iPhone »,

« Made for iPad » et « Made for iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPhone, un iPad, ou un iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur

conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone, un iPad ou un iPod peut altérer les performances sans fil.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.



 **Fabricant légal**

WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Danemark

Document No. 04517-99T01-7700 FR
Order/Item No. 210 020 57
Master Rev01, 12.2020
© 01.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.signia.net