



# **Manuel de sécurité pour aides auditives**



# Sommaire

Consignes de sécurité	3
Utilisation prévue	3
Explication des symboles	3
Avertissements généraux	6
Pour certains types d'appareils	14
Pour les enfants de moins de 3 ans	17
Pour certains types de piles	18
Lors de l'utilisation d'applications de télécommande	19
À l'attention des audioprothésistes	19
Informations importantes	21
Conditions d'utilisation, de transport et de stockage	21
Informations relatives à la mise au rebut	22
Informations relatives à la conformité	22
Garantie et entretien	26
Informations spécifiques au pays	27

# Consignes de sécurité

Ce manuel de sécurité fournit des informations de sécurité et autres informations importantes concernant vos aides auditives. Il porte sur plusieurs types d'appareils et fonctionnalités en option.

- Consultez le guide d'utilisation de vos aides auditives pour en savoir plus sur le type d'appareil et les fonctionnalités activées.

## Utilisation prévue

Les aides auditives sont conçues pour améliorer l'audition des personnes malentendantes. Seuls des spécialistes de l'audition (médecins ORL) sont habilités à établir un diagnostic et à prescrire le port d'une aide auditive.

Utilisez les aides auditives et les accessoires conformément aux guides d'utilisation respectifs.

## Explication des symboles

### Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Informations et avertissements concernant les enfants porteurs d'aides auditives.

## Symboles figurant sur l'appareil ou l'emballage



Étiquette de conformité CE, confirme la conformité avec certaines directives européennes. Veuillez vous reporter au paragraphe « Informations relatives à la conformité ».



Label australien de conformité concernant la compatibilité électromagnétique et les radiocommunications. Veuillez vous reporter au paragraphe « Informations relatives à la conformité ».



Symbole optionnel pour les modèles sur mesure pourvus d'une fonctionnalité sans fil.



Indique le fabricant légal de l'appareil.



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires. Plus d'informations dans le paragraphe « Informations relatives à la mise au rebut ».



L'emballage est recyclable.



Lire et observer les instructions du guide d'utilisation.



Selon la norme CEI 60601-1, les parties appliquées de cet appareil sont de type B.

## Symboles figurant sur l'appareil ou l'emballage



Maintenir au sec lors du transport.



Température lors du transport. Plus d'informations dans le paragraphe « Conditions d'utilisation, de transport et de stockage ».



Humidité relative lors du transport. Plus d'informations dans le paragraphe « Conditions d'utilisation, de transport et de stockage ».



Pression atmosphérique lors du transport. Plus d'informations dans le paragraphe « Conditions d'utilisation, de transport et de stockage ».



Dispositif médical



Compatible avec les chargeurs sans fil certifiés Qi.



Technologie<sup>Bluetooth®</sup> à faible consommation d'énergie.

## Avertissements généraux



### **AVERTISSEMENT**

Risque d'altération de la capacité auditive résiduelle de l'utilisateur.

- ▶ Utilisez uniquement des aides auditives qui ont été parfaitement adaptées à vos besoins.



### **AVERTISSEMENT**

Risque de blessure.

- ▶ N'utilisez pas un appareil qui paraît endommagé, renvoyez-le au point de vente.



### **AVERTISSEMENT**

Veuillez noter que toute modification non autorisée de ce produit peut l'endommager ou causer des blessures.

- ▶ N'utilisez que les pièces et accessoires agréés. Faites appel à votre audioprothésiste qui vous conseillera.



### **AVERTISSEMENT**

Vos aides auditives peuvent réduire certains bruits de fond et potentiellement aussi les bruits de circulation et les signaux sonores d'avertissement.



### **AVERTISSEMENT**

Risque d'explosion !

- ▶ N'utilisez pas vos aides auditives dans des atmosphères explosives (par ex. sur des sites miniers).



## **AVERTISSEMENT**

Risque d'étouffement !

Vos aides auditives contiennent de petites pièces susceptibles d'être avalées.

- ▶ Tenez les aides auditives, les piles et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes handicapées mentales.
- ▶ En cas d'ingestion des pièces, consultez un médecin ou rendez vous immédiatement à l'hôpital.

Si vous prévoyez de faire porter les aides auditives à des enfants de moins de 3 ans ou à des personnes dont l'âge de développement est inférieur à 3 ans, veuillez vous reporter au paragraphe « Pour les enfants de moins de 3 ans ».



## **REMARQUE**

- ▶ Protégez vos aides auditives de la forte humidité. Ne les portez pas sous la douche ni lorsque vous utilisez des produits cosmétiques, du parfum, de l'après-rasage, de la laque ou de la lotion solaire.



## **REMARQUE**

- ▶ Protégez vos aides auditives de la chaleur extrême. Rangez-les à l'abri des rayons directs du soleil.

**REMARQUE**

- ▶ Ne mettez pas vos aides auditives dans le four à micro-ondes.

**REMARQUE**

Différents types de fortes radiations, par ex. lors d'examens radiologiques ou IRM de la tête, peuvent endommager les aides auditives.

- ▶ Ne portez pas vos aides auditives durant ces examens ou autres procédures similaires.

Les radiations plus faibles comme celles de l'équipement radio ou de la sécurité aéroportuaire n'altèrent pas les aides auditives.

**REMARQUE**

Vos appareils sont conformes aux normes internationales.

Nous ne pouvons toutefois pas garantir le fonctionnement sans interférence de tous les produits que nous mettons sur le marché ; par exemple, certaines plaques à induction peuvent causer des interférences sonores.

**REMARQUE**

En cas d'incident grave, signalez l'événement au fabricant de l'appareil.

**REMARQUE**

Quand vous ne les utilisez pas, rangez vos appareils auditifs dans le boîtier en plastique ou le boîtier de charge fourni (le cas échéant) et tenez-les hors de portée des enfants.



## Contre-indications

---



### **AVERTISSEMENT**

En cas d'allergie de contact connue, consultez avant utilisation le fabricant de l'aide auditive au sujet de la présence de l'allergène. Si une réaction allergique se développe après le port de l'aide auditive, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin agréé.

---



### **AVERTISSEMENT**

Consultez un audioprothésiste si vous ressentez des effets secondaires inhabituels tels qu'une irritation cutanée, qu'une accumulation excessive de cérumen, vertiges, modifications de l'audition, ou si vous pensez qu'il peut y avoir un objet étranger dans votre conduit auditif.



## AVERTISSEMENT

Un audioprothésiste devrait conseiller à l'utilisateur potentiel d'une aide auditive de consulter un médecin diplômé avant d'utiliser l'aide auditive, si l'audioprothésiste détermine que l'utilisateur potentiel a l'un des symptômes ou antécédents médicaux suivants :

- ▶ Déformation congénitale ou traumatique visible de l'oreille.
- ▶ Antécédent de drainage actif de l'oreille dans les trois derniers mois.
- ▶ Antécédent de perte auditive soudaine ou d'une détérioration progressive rapide dans les trois derniers mois.
- ▶ Vertiges aigus ou chroniques.
- ▶ Perte auditive unilatérale d'apparition soudaine ou récente dans les trois derniers mois.
- ▶ Écart aérien-osseux, audiométrique, égal ou supérieur à 15 dB à 500 Hz, 1 000 Hz, et 2 000 Hz.
- ▶ Preuve visible d'un dépôt de cérumen significatif ou d'un corps étranger dans le canal auditif.
- ▶ Douleur ou gêne dans l'oreille.

## Aides auditives dotées d'une fonctionnalité sans fil

---



Certains pays imposent des restrictions à l'utilisation d'un équipement sans fil.

- ▶ Renseignez-vous auprès des administrations locales.
- 



### AVERTISSEMENT

Risque de perturbation des équipements électroniques !

- ▶ Dans les zones où des restrictions d'utilisation d'appareils électroniques ou sans fil sont en vigueur, vérifiez si vous devez éteindre votre appareil.
- 



### REMARQUE

Vos aides auditives sont conçues en conformité avec les normes internationales relatives à la compatibilité électromagnétique, mais des interférences peuvent se produire avec des appareils électroniques situés à proximité. Dans ce cas, éloignez-vous de la source d'interférences.

## Aides auditives dotées d'un dispositif anti-acouphènes

Vos aides auditives peuvent être équipées d'un dispositif anti-acouphènes (p. ex. avec un signal de traitement anti-acouphènes, un bruit anti-acouphènes ou une autre fonction spéciale). N'utilisez le dispositif anti-acouphènes qu'après consultation de votre audioprothésiste et sur ses conseils.



## **AVERTISSEMENT**

Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

Le volume du dispositif anti-acouphènes peut à certains niveaux très élevés entraîner des lésions irréversibles de l'audition en cas d'utilisation prolongée.

- ▶ Le dispositif anti-acouphènes ne doit jamais être utilisé à des niveaux inconfortables.

## **Aides auditives dotées d'un aimant AutoPhone**



## **AVERTISSEMENT**

Risque de perturbation des systèmes d'assistance vitale !

- ▶ Les aimants ne doivent être utilisés qu'en respectant une distance de sécurité entre eux et des systèmes d'assistance vitale comme les stimulateurs cardiaques ou les valves magnétiques. Par exemple, la distance de sécurité entre un stimulateur cardiaque et un aimant doit être d'au moins 10 cm.



## **REMARQUE**

Les aimants peuvent perturber les appareils électriques et supprimer des données enregistrées.

- ▶ Tenez les aimants éloignés des ordinateurs, moniteurs, téléviseurs, supports de stockage et autres équipements/dispositifs électroniques.



## REMARQUE

Si des aimants AutoPhone sont situés à proximité des écouteurs des aides auditives de type RIC (écouteur dans le conduit auditif), ils peuvent les endommager.

- ▶ Laissez une distance d'au moins 2 cm (0,8 pouce) entre l'écouteur RIC et tout aimant, dont l'aimant AutoPhone.

Par exemple, ne rangez pas dans une poche ou un boîtier de petite taille vos aides auditives RIC et un smartphone auquel un aimant AutoPhone est fixé.

## Aides auditives dotées d'un aimant dans le tiroir pile



## AVERTISSEMENT

Risque d'interférences avec des implants actifs et non actifs !

Il y a un aimant dans le tiroir pile. Par conséquent, si vous portez un implant actif ou non actif, p. ex. un implant cérébral :

- ▶ Avant toute utilisation, faites-en vérifier la compatibilité électromagnétique.  
Consultez le médecin qui a implanté l'appareil avant d'utiliser vos aides auditives.
- ▶ Maintenez une distance de sécurité d'environ 4 cm entre l'implant et les aides auditives.

## Pour certains types d'appareils

### Modèles BTE

Appareils portés derrière l'oreille et dotés d'un tube.

---



#### **ATTENTION**

Risque de blessure.

- ▶ Portez toujours le tube avec un embout.
  - ▶ Vérifiez que l'embout est correctement fixé.
- 



#### **ATTENTION**

Risque de blessure.

- ▶ Introduisez doucement l'aide auditive sans aller trop loin dans l'oreille.
- 



#### **ATTENTION**

Risque de blessure.

- ▶ Dans de très rares cas, l'embout peut rester dans votre oreille lorsque vous retirez votre aide auditive. Si cela vous arrive, faites retirer l'embout par un professionnel du secteur médical.

## Modèles RIC

L'écouteur est placé à l'intérieur du conduit auditif et connecté à l'appareil par le câble de l'écouteur.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Portez toujours le câble de l'écouteur avec un embout.
- ▶ Vérifiez que l'embout est correctement fixé.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Introduisez doucement l'aide auditive sans aller trop loin dans l'oreille.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Dans de très rares cas, l'embout peut rester dans votre oreille lorsque vous retirez votre aide auditive. Si cela vous arrive, faites retirer l'embout par un professionnel du secteur médical.



### REMARQUE

- ▶ Ne tirez pas sur le câble de l'écouteur ceci afin d'éviter tout risque d'endommagement de l'aide auditive.



## Modèles à ajustement immédiat

L'appareil auditif est placé dans le conduit auditif et maintenu à l'aide d'un embout.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Portez toujours l'aide auditive avec un embout.
- ▶ Vérifiez que l'embout est correctement fixé.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Introduisez doucement l'aide auditive sans aller trop loin dans l'oreille.



### ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Dans de très rares cas, l'embout peut rester dans votre oreille lorsque vous retirez votre aide auditive. Si cela vous arrive, faites retirer l'embout par un professionnel du secteur médical.

## Autres modèles

Pour tous les autres modèles, aucune consigne de sécurité spécifique au modèle ne s'applique.



## Pour les enfants de moins de 3 ans

Il existe des aides auditives spécifiques pour les enfants de moins de 3 ans ou les personnes dont l'âge de développement est inférieur à 3 ans. Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste.



### AVERTISSEMENT



Risque d'étouffement.

Vos aides auditives contiennent de petites pièces susceptibles d'être avalées.

- ▶ Le port des aides auditives par des nourrissons, des enfants en bas âge ou des personnes ayant une déficience intellectuelle doit s'effectuer dans le cadre d'une surveillance adaptée.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'intégrité des aides auditives.
- ▶ Veillez à ce que votre enfant ou une personne ayant une déficience intellectuelle ne détache pas l'aide auditive de l'embout auriculaire.
- ▶ Si le boîtier est déformé, prenez contact avec votre audioprothésiste.
- ▶ Veillez à ce que le tiroir pile soit fermé. Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme de verrouillage.
- ▶ Tenez les piles et les accessoires hors de portée des enfants ou d'une personne ayant une déficience intellectuelle.
- ▶ En cas d'ingestion, consultez un médecin ou rendez vous immédiatement à l'hôpital.

## Pour certains types de piles

### Pour les aides auditives équipées de batteries intégrées (batteries rechargeables lithium-ion)

Lisez les consignes de sécurité concernant les batteries qui sont contenues dans le guide d'utilisation de l'aide auditive.

### Pour les aides auditives équipées de piles remplaçables



#### REMARQUE

Utilisez uniquement des piles zinc-air ou des piles rechargeables nickel-hydrure métallique (NiMH).  
N'utilisez pas de piles rechargeables argent-zinc ou lithium-ion, par exemple.



#### REMARQUE

Si les piles présentent une fuite, elles risquent d'endommager vos aides auditives.

- ▶ Lorsque vous ne les utilisez pas, éteignez vos aides auditives afin de préserver la pile.
- ▶ Retirez les piles si vous n'utilisez pas vos aides auditives pendant une période prolongée.

Le tableau suivant vous aide à trouver la pile zinc-air adéquate. La taille de pile appropriée à vos aides auditives est indiquée dans le guide d'utilisation.

Taille de pile	Code CEI	Code ANSI	Code couleur typique
10	PR70	7005ZD	Jaune
13	PR48	7000ZD	Orange
312	PR41	7002ZD	Marron
675	PR44	7003ZD	Bleu

## Lors de l'utilisation d'applications de télécommande

Lors de l'utilisation d'une application de télécommande des aides auditives :



### AVERTISSEMENT

Risque de dommage auditif !

L'appareil pourvu de l'application de contrôle des aides auditives génère de brefs signaux de commande qui peuvent être audibles. Si l'appareil utilisant l'application a une sortie audio très élevée, il y a un risque de dommage auditif.

Pendant l'utilisation de l'application :

- ▶ Ne tenez pas le haut-parleur de l'appareil près de vos oreilles ou des oreilles d'autrui.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil avec des casques, des micro-casques ou autres appareils de lecture audio.

## À l'attention des audioprothésistes



### AVERTISSEMENT

Pour les aides auditives ayant un niveau de pression sonore en sortie de 132 dB SPL ou plus :

Risque d'altération de la capacité auditive résiduelle de l'utilisateur.

- ▶ Faites particulièrement attention lors de l'adaptation de cette aide auditive.

## Dispositif anti-acouphènes

La population cible est principalement les adultes de plus de 21 ans. Le patient peut avoir un certain contrôle du niveau ou du volume du signal, et il devrait convenir de ce réglage ainsi que de son niveau de confort et du type de signal sonore avec son audioprothésiste.



### AVERTISSEMENT

Risque de baisse supplémentaire d'audition pour l'utilisateur.

Le volume du dispositif anti-acouphènes peut à certains niveaux très élevés entraîner des lésions irréversibles de l'audition en cas d'utilisation prolongée.

- ▶ Si le dispositif anti-acouphènes est réglé à un niveau sonore élevé dans l'aide auditive, informez l'utilisateur ou l'utilisatrice du temps maximum acceptable d'utilisation.

À titre d'exemple, les directives sur la sécurité au travail restreignent à huit heures par jour l'exposition à un bruit continu d'un niveau de pression acoustique de 80 dBA.

- ▶ Le dispositif anti-acouphènes ne doit jamais être utilisé à des niveaux inconfortables.

# Informations importantes

## Conditions d'utilisation, de transport et de stockage

### Pour les aides auditives équipées de batteries intégrées (batteries rechargeables lithium-ion)

Lisez les conditions d'utilisation, de transport et de stockage dans le guide d'utilisation de l'aide auditive.

### Pour les aides auditives équipées de piles remplaçables

Les aides auditives fonctionnent dans les conditions ambiantes suivantes (également applicables entre les utilisations) :

Température	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité relative	5 à 93 %
Pression atmosphérique	700 à 1060 hPa

En cas de période prolongée de transport ou de stockage, veuillez respecter les conditions suivantes :

	Stockage	Transport
Température	10 à 40 °C (50 à 104 °F)	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative	10 à 80 %	5 à 90 %
Pression atmosphérique	700 à 1060 hPa	700 à 1060 hPa

Les conditions peuvent être différentes pour d'autres pièces, par exemple les piles.

## **Informations relatives à la mise au rebut**

- ▶ Recyclez vos aides auditives, accessoires et emballages conformément aux réglementations locales.

### **Pour les aides auditives équipées de piles remplaçables**

- ▶ Pour éviter de polluer l'environnement, ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.
- ▶ Recyclez ou éliminez les piles conformément aux réglementations locales ou rappez-les à votre audioprothésiste.


## **Informations relatives à la conformité**

Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes :

- Règlement (UE) 2017/745 pour les produits fabriqués par WSAUD A/S et 93/42/CEE pour les produits fabriqués par Signia GmbH et Sivantos GmbH\*
- Directive 2011/65/UE RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses
- Seulement pour les produits pourvus d'une fonctionnalité sans fil : Directive 2014/53/UE RED concernant les équipements radioélectriques

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible ici : [www.wsaud.com](http://www.wsaud.com).

\* voir déclaration de conformité

La marque de conformité ACMA  atteste de la conformité avec les normes relatives aux interférences électromagnétiques établies par l'Autorité australienne des médias et des communications (ACMA).

Les appareils sur lesquels est apposé le marquage FCC sont conformes aux normes de la FCC concernant les interférences électromagnétiques (seulement pour les produits pourvus d'une fonctionnalité sans fil).

### Détails techniques

Si l'information de certification pour les États-Unis d'Amérique et le Canada ne figure pas dans le guide d'utilisation des aides auditives, les numéros de certification suivants s'appliquent :

- Modèle sans fil : e2e 3.0
- **USA** FCC ID : SGI-WL003BTE
- **Canada** : 267AB-WL003BTE

### Avis

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Un changement ou une modification apporté à cet appareil sans être expressément approuvé par le fabricant légal peut annuler l'autorisation FCC d'utilisation de l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC et aux normes RSS d'exemption de licence de l'organisme canadien ISDE.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux valeurs limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, peut produire des interférences nuisibles aux liaisons radio. Cependant, rien ne garantit que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec des récepteurs de radio ou télévision, lesquelles peuvent être déterminées par l'arrêt et la remise en marche de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de les corriger par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.



Cet appareil a été testé pour un fonctionnement porté sur le corps et il est conforme aux directives de la FCC concernant l'exposition aux radiofréquences, s'il est utilisé avec les accessoires du fabricant légal qui sont fournis ou désignés pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC concernant l'exposition aux radiofréquences.

Des données sont stockées à l'intérieur de l'aide auditive. Celles-ci comportent :

- l'audiogramme ;
- la durée moyenne pendant laquelle l'aide auditive est portée au quotidien ;
- la répartition des fréquences des environnements acoustiques (c.-à-d. le pourcentage de la durée pendant laquelle vous avez porté l'aide auditive dans un environnement calme, dans un environnement bruyant, dans un environnement avec des interlocuteurs, dans une voiture et la fréquence à laquelle vous avez écouté de la musique) ,
- les différents niveaux de bruit (y compris le bruit du vent) au cours des 24 dernières heures ;
- la fréquence moyenne des changements relatifs aux boutons de commande gérés par l'utilisateur ;
- la fréquence moyenne de fonctionnement actif des algorithmes des aides auditives ;
- un numéro d'identification.

Une partie des informations à l'intérieur de vos aides auditives est en outre stockée dans des bases de données distinctes sous forme anonymisée (ce qui signifie que les données ne permettent pas de vous identifier) afin d'améliorer la qualité des futures prothèses auditives. Ces informations peuvent aider votre acousticien à vous fournir la solution qui correspond le mieux à vos besoins. Cependant, il ne lira pas ces informations sans votre consentement. En outre, lorsque vous enverrez votre appareil pour l'entretien, ces informations ne seront pas lues sans votre consentement.

## **Garantie et entretien**

Les conditions de toute garantie s'appliquant à ce produit sont énoncées dans le contrat conclu entre vous et le fournisseur auprès de qui vous avez acheté ce produit. Ce document n'a pas pour but de créer des droits supplémentaires en matière de garantie s'appliquant directement contre le fabricant.

Lorsque le fabricant reçoit ce produit pour réparation ou remplacement couvert par la garantie, conformément à ce contrat, toute réparation ou tout remplacement peut être effectué avec des pièces ou des produits neufs, utilisés ou remis à neuf. Les réparations ou les remplacements n'interrompent pas, n'étendent pas ou ne prolongent pas la durée d'une quelconque garantie.

## **Informations spécifiques au pays**

Informations importantes : Australie et Nouvelle-Zélande

En cas d'ingestion de la batterie, contactez la hotline d'information antipoison au 13 11 26 pour l'Australie et au 0800 764 766 pour la Nouvelle-Zélande.

Pour les autres pays, contactez la hotline d'information antipoison locale.

Ce document s'applique aux aides auditives fabriquées par  
Sivantos GmbH et Signia GmbH.

Ce document s'applique aux aides auditives fabriquées par  
AS AUDIO-SERVICE GmbH.

Ce document s'applique aux aides auditives fabriquées par  
WSAUD A/S.

Document No. 03342-99T04-7700 FR

Order/Item No. 109 509 73

Master Rev06, 02.2021

© 02.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

