




signia

Motion C&G X Motion C&G SP X Motion C&G P X

Guide à l'attention des audioprothésistes

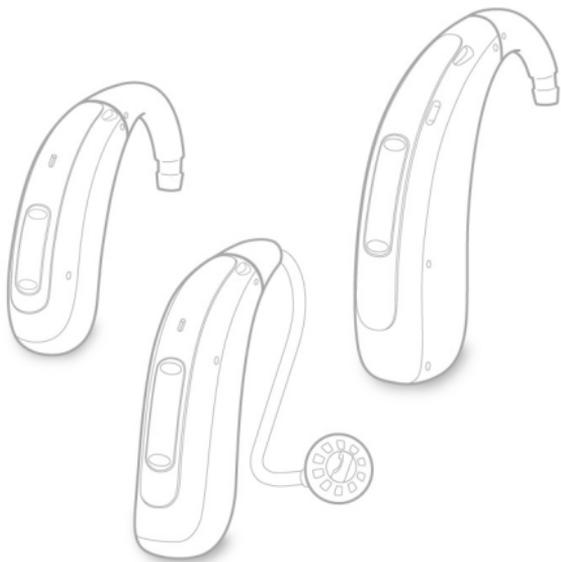

Made for



iPhone | iPad | iPod

Sommaire

Introduction	3
Avant et après l'appareillage	4
Assemblage	4
Activation	6
Charge	6
Connexion	6
À propos du numéro de série	7
Remplacement du boîtier	8
Démontage	8
Assemblage	10
Informations importantes sur la sécurité	13
Batteries défectueuses	13
Autres informations	15
Symboles utilisés dans ce document	15

Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur les aides auditives équipées de batteries (batteries lithium-ion) intégrées de façon permanente.



ATTENTION

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.


Avant et après l'appareillage

Avant de commencer l'appareillage, vous devez préparer les appareils auditifs.


Assemblage

- ▶ Chaque appareil auditif est livré avec une batterie préinstallée. Il n'est donc pas nécessaire d'y insérer de pile.
- ▶ Fixez le ThinTube approprié ou fixez un coude aux appareils auditifs.

Fixation du coude :

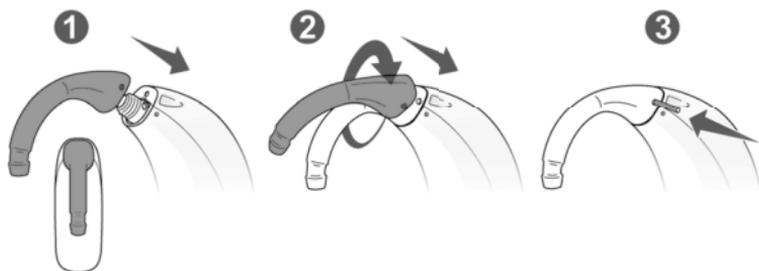


Fixation du ThinTube* :

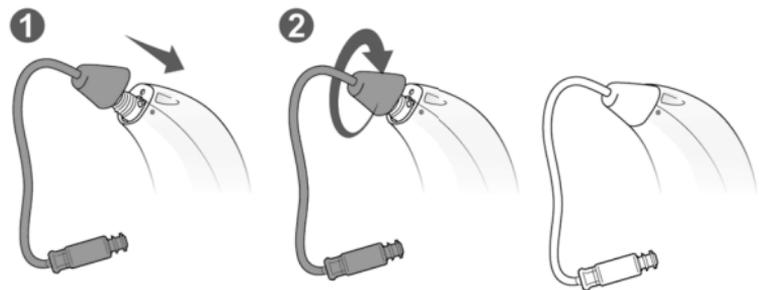


* Uniquement applicable pour les appareils Motion C&G X et Motion C&G P X.

- Fixez le fouet de maintien en option :

Alignez l'extrémité du fouet de maintien avec l'extrémité plate de l'écouteur.

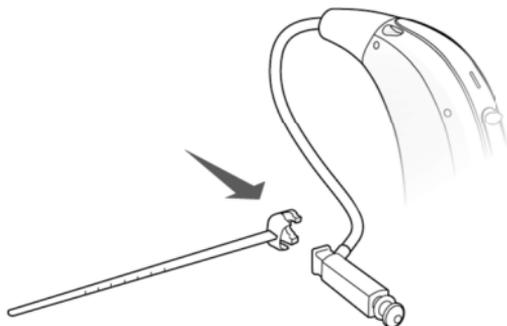

Puis, enfoncez le fouet de maintien vers l'écouteur jusqu'à ce qu'il se clipse en place.

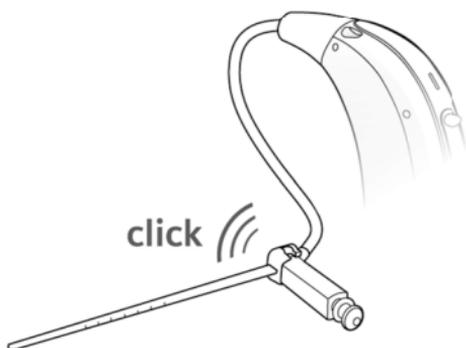

Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, vous devez activer les appareils auditifs en les plaçant dans le chargeur. Attendez que le premier voyant orange ou vert s'allume.

Remarque :

Les appareils auditifs qui sont activés, mais **inutilisés**, peuvent se décharger plus vite que des appareils auditifs qui n'ont **pas** été activés. Par conséquent, veillez à n'activer les appareils auditifs qu'en prévision d'une première utilisation ou d'un premier appareillage.

Charge

Les appareils auditifs sont préchargés à la livraison. Ils devraient avoir suffisamment de puissance pour la réalisation du premier appareillage.

Nous recommandons d'effectuer une charge complète des appareils auditifs avant le premier appareillage et la remise au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.


Conformez-vous aux conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'appareil auditif et du chargeur.

Connexion

Utilisez Noahlink Wireless pour procéder à la programmation sans fil des appareils auditifs.

À propos du numéro de série

Lorsqu'un appareil auditif est renvoyé par nos services, vérifiez le numéro de série. Le numéro de série et le niveau de performance sont imprimés sur le boîtier. Retirez le rocker-switch pour voir ces éléments.

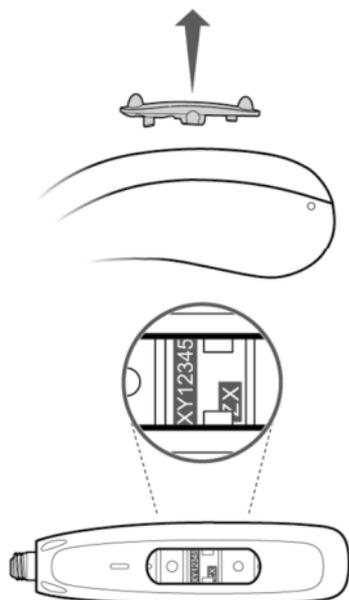

Remplacement du boîtier



REMARQUE


- ▶ Cette tâche de maintenance doit être effectuée par l'audioprothésiste.

Quand vous démontez un boîtier porteur d'un numéro de série, procédez à son élimination.


Démontage

- ▶ Retirez le coude ou le ThinTube.


Retrait du coude :

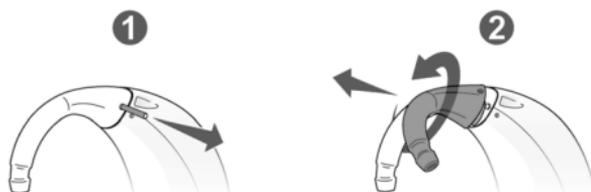


Retrait du ThinTube :

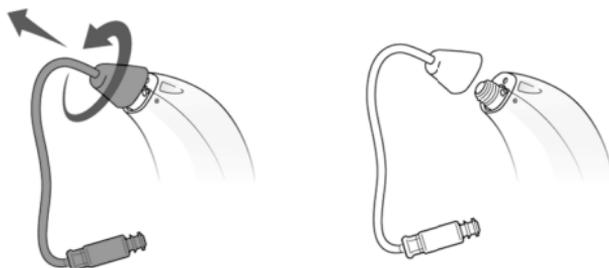


- ▶ Retirez les axes du boîtier.

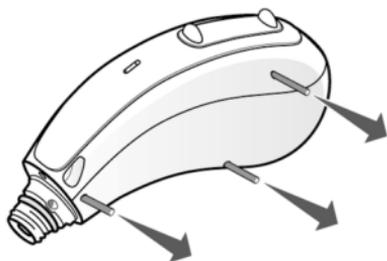

- ▶ Détachez le boîtier supérieur.

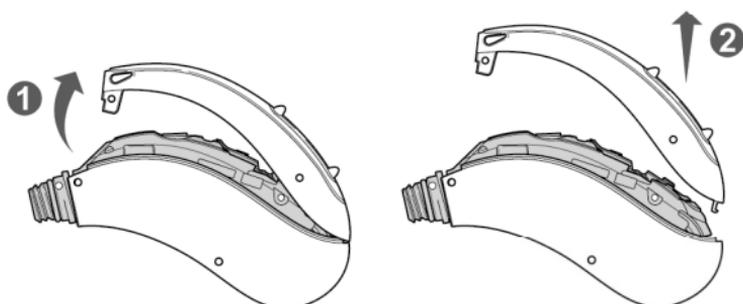


- ▶ Retirez le boîtier inférieur en le tirant.

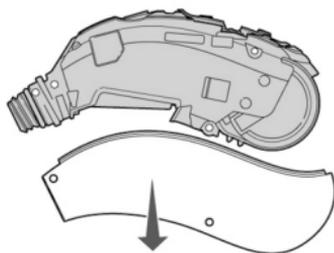


Assemblage


- ▶ Alignez le boîtier inférieur et l'appareil. Puis, installez le boîtier inférieur.

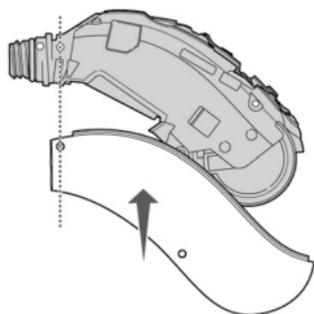


- ▶ Installez le boîtier supérieur.

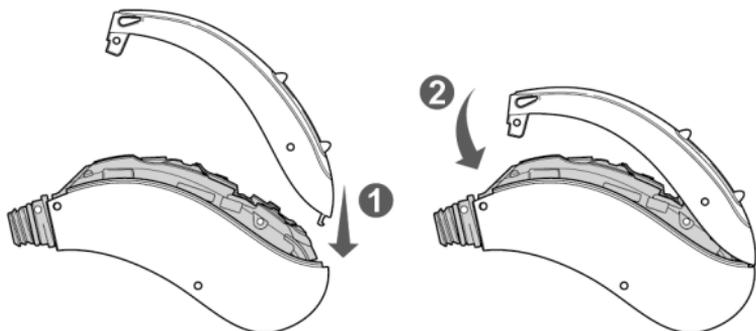

- ▶ Fixez les axes. Respectez bien les différentes longueurs et les différents diamètres des axes.

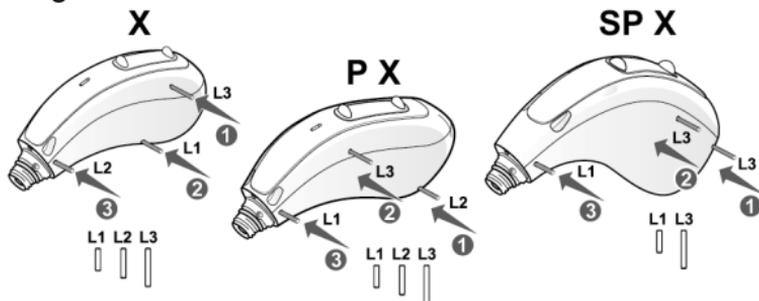

- ▶ Clipsez le rocker-switch sur le boîtier supérieur. Pour certains appareils auditifs, cet élément n'est pas fourni monté.

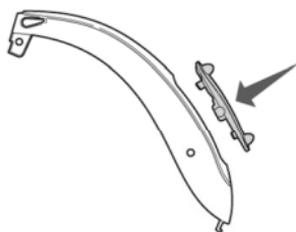


- ▶ Insérez le repère côté.




- ▶ Fixez un coude ou le ThinTube approprié à l'appareil auditif.

Fixation du coude :

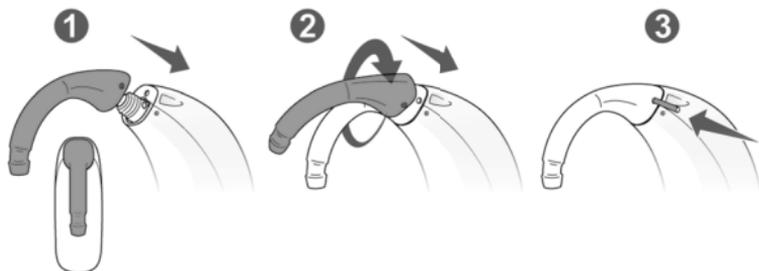

Fixation du ThinTube :

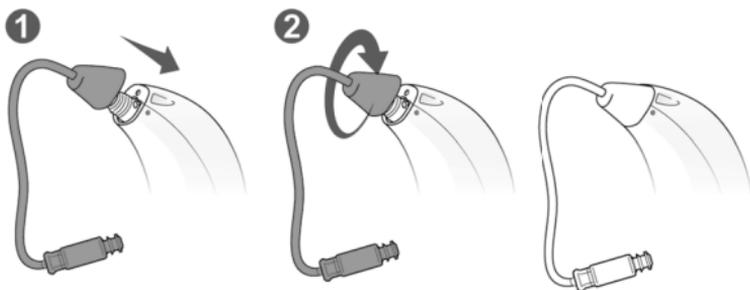

Informations importantes sur la sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec les appareils auditifs.



REMARQUE

- ▶ Vous ne devez en aucun cas remplacer les batteries. Cette opération relève exclusivement de la compétence d'un centre d'entretien agréé.

Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est défectueuse :

- ▶ Placez les appareils auditifs dans le chargeur. Si un voyant s'allume en rouge, alors la batterie est effectivement défectueuse.
- ▶ Procédez à un examen visuel de l'appareil auditif. Le test est considéré comme non concluant si vous constatez au moins une des conditions ci-dessous :
 - Il y a des signes physiques de déformation, provoquée par le gonflement de la batterie au lithium à l'intérieur de l'appareil auditif.
 - Il y a des traces visibles de fuite émanant de la batterie au lithium.
 - Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au toucher.

Si une seule de ces étapes d'essai révèle une anomalie, vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. Pour des raisons de sécurité, il n'est plus possible d'expédier les appareils auditifs. Par conséquent, veuillez noter le numéro de série de l'appareil auditif, prendre une photo des dommages constatés, puis consulter le service client avant de mettre votre produit au rebut, en respectant la réglementation locale.

Autres informations

Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Made for

 iPhone | iPad | iPod

« Made for iPhone »,

« Made for iPad » et « Made for iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPhone, un iPad, ou un iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone, un iPad ou un iPod peut altérer les performances sans fil.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.



 **Fabricant légal**

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Danemark

www.signia-audition.fr

www.signia-hearing.can

www.signia-hearing.ch

Document No. 04430-99T01-7700 FR

Order/Item No. 110 003 59

Master Rev01, 10.2020

© 11.2020, WSAUD A/S. All rights reserved


0123

www.signia-hearing.com