


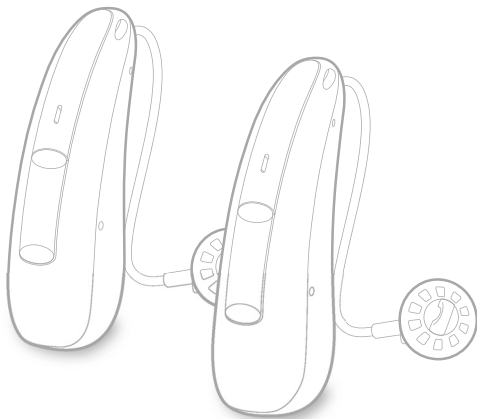

Pure C&G AX

Pure C&G T AX

Guide à l'attention des audioprothésistes



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

Sommaire

Introduction	3
Avant et après l'appareillage	4
Assemblage	4
Activation	5
Charge	5
Connexion	5
À propos du numéro de série	6
Remplacement du boîtier	8
Démontage	8
Montage	10
Consignes de sécurité importantes	12
Batteries défectueuses	12
Autres informations	14
Périodes de stockage	14
Nettoyage	14
Symboles utilisés dans ce document	14

Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur les aides auditives équipées de batteries (batteries lithium-ion) intégrées de façon permanente.



ATTENTION


Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.

Avant et après l'appareillage


Avant de commencer l'appareillage, vous devez préparer les appareils auditifs.

Assemblage

- ▶ Chaque appareil auditif est livré avec une batterie préinstallée. Vous ne devez pas insérer la batterie vous-même.
- ▶ Fixez un embout adapté à l'écouteur correspondant.
- ▶ Clipsez l'écouteur sur l'appareil auditif.

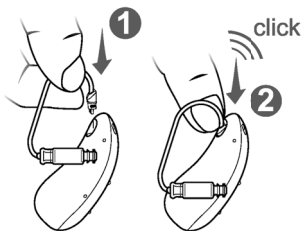

- ▶ Fixez le fouet de maintien en option : Alignez l'extrémité du fouet de maintien avec l'extrémité plate de l'écouteur. Puis, enfoncez le fouet de maintien vers l'écouteur jusqu'à ce qu'il se clipse en place.

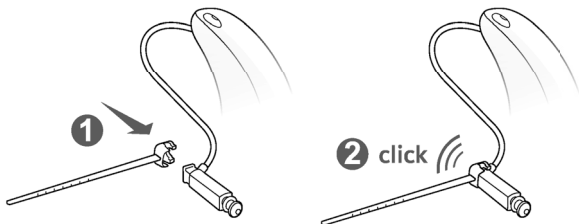

Activation

Avant la première utilisation ou la première pose, vous devez activer les appareils auditifs en les plaçant dans le chargeur. Attendez que le premier voyant vert s'allume.

Remarque :

- Les appareils auditifs qui sont activés, mais **inutilisés**, peuvent se décharger plus vite que des appareils auditifs qui n'ont **pas** été activés. Par conséquent, veillez à n'activer les appareils auditifs qu'en prévision d'une première utilisation ou d'un premier appareillage.

Charge

Les appareils auditifs sont préchargés à la livraison. Ils devraient avoir suffisamment de puissance pour la réalisation du premier appareillage.

Nous recommandons d'effectuer une charge complète des appareils auditifs avant le premier appareillage et la remise au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.

Conformez-vous aux conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'appareil auditif et du chargeur.

Connexion

Utilisez Noahlink Wireless pour procéder à la programmation sans fil des appareils auditifs.

À propos du numéro de série

Le numéro de série et le niveau de performance sont imprimés sur le cadre.

Après une prise en charge de votre appareil auditif par nos services, veuillez à vérifier le numéro de série figurant sur le cadre.

Pour le modèle Pure C&G AX :


- Appuyez sur la partie inférieure du rocker-switch puis retirez-le par la partie supérieure.

Pour le modèle Pure C&G T AX avec bobine téléphonique :


- Appuyez sur la partie supérieure du rocker-switch puis retirez-le par la partie inférieure.

Veuillez vous référer à l'illustration.

AX

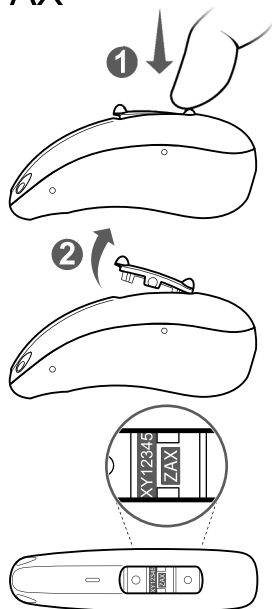

TAX

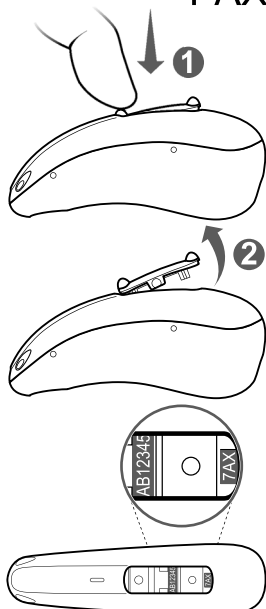

Remarque : Si vous appuyez sur la partie inférieure du rocker-switch pendant plus de 3 secondes, l'appareil auditif risque de s'allumer. Après avoir remis le rocker-switch en place, vous pouvez éteindre l'appareil auditif en exerçant une pression longue sur la partie supérieure du rocker-switch.

Remplacement du boîtier




REMARQUE


- ▶ Cette tâche de maintenance doit être effectuée par l'audioprothésiste.

Démontage

- ▶ Retirez l'écouteur et les axes.

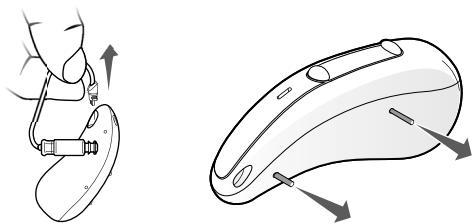


- ▶ Détachez le boîtier supérieur, comme illustré.


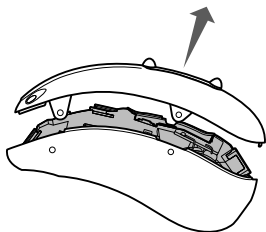


- Retirez le boîtier inférieur, comme illustré. Sur le modèle Pure C&G T AX, il se peut que vous deviez insérer un outil dans le trou borgne.

AX

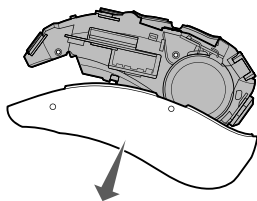


T AX

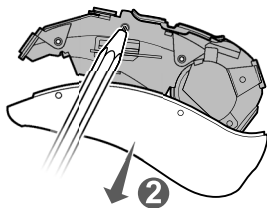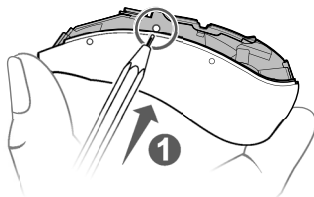


Montage


- ▶ Installez le boîtier inférieur.

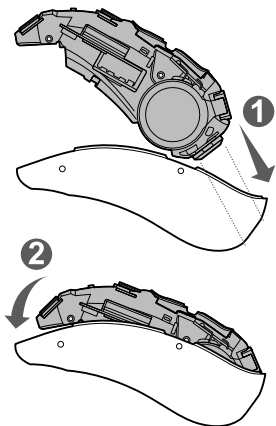


- ▶ Installez le boîtier supérieur en engageant d'abord la partie avant.

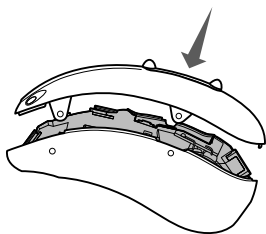

- Fixez les axes. Respectez bien les différentes longueurs et les différents diamètres des axes.

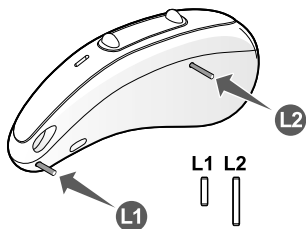

- Fixez l'écouteur.

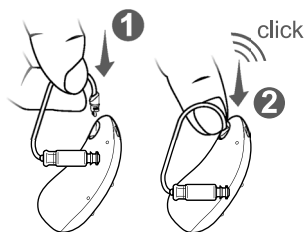

Consignes de sécurité importantes

Cette section présente des consignes de sécurité importantes concernant la batterie. Pour davantage d'informations sur la sécurité, consultez le manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec les appareils auditifs.



REMARQUE

- ▶ Vous ne devez en aucun cas remplacer les batteries. Cette opération relève exclusivement de la compétence d'un centre d'entretien agréé.

Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est défectueuse :

- ▶ Placez l'appareil auditif dans le chargeur. Si un voyant devient rouge, alors la batterie est effectivement défectueuse.
- ▶ Procédez à un examen visuel de l'appareil auditif. Le test est considéré comme non concluant si vous constatez au moins une des conditions ci-dessous :
 - La présence de signes physiques de déformation provoquée par le gonflement de la batterie.
 - La présence de traces visibles de fuite émanant de la batterie.
 - Le produit génère de la chaleur ou est chaud au toucher.

Si une seule de ces étapes d'essai révèle une anomalie, vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. Pour des raisons de sécurité, il n'est plus possible d'expédier les appareils auditifs. Par conséquent, veuillez noter le numéro de série de l'appareil auditif, prendre une photo des dommages constatés, puis consulter le service client avant de mettre votre produit au rebut, en respectant la réglementation locale.

Autres informations

Périodes de stockage

La durée de vie d'un produit non utilisé et non activé est de 6 mois.

Une fois activée, la batterie doit être chargée au moins tous les 6 mois pour rester en bon état. Par prudence, nous vous recommandons de charger les appareils auditifs au moins tous les 3 mois.

Nettoyage



Lorsque vous recommandez des produits de nettoyage et des kits d'entretien spéciaux ou donnez des informations complémentaires quant au maintien des appareils auditifs en bon état, pensez à :

Ne pas utiliser de solvant à base d'alcool sur les contacts de charge.

Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Made for

iPhone | iPad | iPod

« Made for iPhone », « Made for iPad » et « Made for iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPhone, un iPad, ou un iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone, un iPad ou un iPod peut altérer les performances sans fil.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.



 **Fabricant légal**

WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Danemark

Document No. 04577-99T01-7700 FR
Order/Item No. 210 038 50
Master Rev01, 02.2021
© 03.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.signia.net