


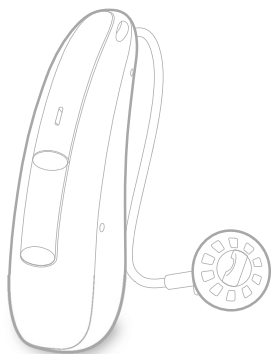

CROS Pure C&G AX

Guide d'utilisation



Sommaire

Bienvenue	4
<hr/>	
Votre transmetteur CROS	5
Composants	7
Boutons de commande	9
Programmes d'écoute	10
Bips sonores	10
<hr/>	
Manipulation de vos aides auditives	11
Insertion et retrait de l'émetteur	11
Mise en marche et arrêt	16
Passage en mode veille	17
Changement de programme d'écoute	18
Bluetooth®	18
Charge	19
<hr/>	
Maintenance et entretien	21
Émetteur	21
Embouts	23
Maintenance effectuée par un professionnel	25

Autres informations	26
Accessoires	26
Explication des symboles	26
Conditions d'utilisation, de transport et de stockage	28
Informations relatives à la mise au rebut	29
Dépannage	30
Informations relatives à la conformité	30
Informations spécifiques au pays	33
Consignes générales de sécurité	34
Batterie rechargeable lithium-ion	34
Sécurité des personnes	36
Sécurité du produit	40
Entretien et garantie	43

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos accessoires auditifs.

Ce guide, ainsi que l'assistance fournie par votre audioprothésiste, vous aideront à comprendre les avantages et la meilleure qualité de vie offerts par cet accessoire.



ATTENTION

Il est important de bien lire l'intégralité de ce guide d'utilisation. Suivez les informations de sécurité pour éviter d'éventuels dommages ou blessures.


Il est également primordial de lire et de suivre le guide d'utilisation ainsi que le manuel de sécurité de l'appareil auditif utilisé avec cet accessoire.

Votre transmetteur CROS

Les solutions CROS sont conçues pour les personnes atteintes d'une importante perte auditive unilatérale qui ne peut pas être compensée par une aide auditive. Un transmetteur CROS porté sur cette oreille capture le son provenant de ce côté et le transmet à l'aide auditive placée sur l'autre oreille. Cela permet au porteur de l'aide auditive d'entendre les sons des deux côtés.

Transmetteur CROS

aide auditive

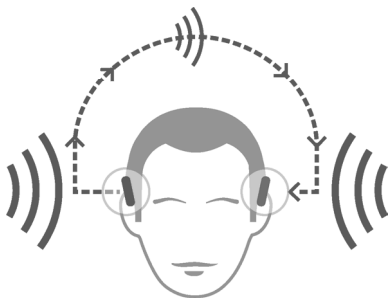

Deux solutions sont disponibles :

- solution CROS :

Pour les personnes ayant une audition normale d'une oreille et une importante perte auditive de l'autre oreille. Les sons provenant du côté de l'oreille atteinte de la perte auditive sont capturés et transmis sans fil au côté qui entend bien.

- solution BiCROS :

Pour les personnes ayant une importante perte auditive d'une oreille et une perte auditive moins sévère de l'autre oreille. Les sons provenant du côté de l'oreille atteinte de la perte auditive sévère sont capturés et transmis sans fil au côté qui entend mieux. L'aide auditive traite et amplifie les sons provenant des deux côtés.


Le transmetteur CROS fonctionne avec nos aides auditives sans fil spécifiques. Votre audioprothésiste vous conseillera sur les modèles compatibles.



REMARQUE




Ce guide d'utilisation s'applique uniquement au transmetteur CROS. Il existe un guide d'utilisation spécifique pour votre aide auditive.

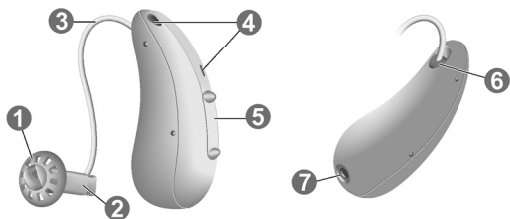Composants



-
- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Embout | ⑤ Rocker-switch (bouton de commande et bouton marche/arrêt) |
| ② Écouteur | ⑥ Repère latéral (rouge = oreille droite, bleu = oreille gauche) et connecteur de l'écouteur |
| ③ Câble de l'écouteur | |
| ④ Microphones | |
| | ⑦ Contacts de charge |
-

Vous pouvez utiliser les embouts standard suivants :

Embouts standard	Taille
<input type="radio"/> 	Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Open
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Tulip

Il est facile de remplacer des embouts standard.
Plus d'informations dans le paragraphe
« Maintenance et entretien ».

Embouts personnalisés

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <input type="radio"/>  | Embout 3.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Boutons de commande

Le rocker-switch vous permet, par exemple, de changer de programme d'écoute. Votre audioprothésiste a programmé les fonctions de votre choix sur le rocker-switch.

Fonctionnement du rocker-switch	G	D
Appui bref :		
Défilement des programmes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume +/-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niveau CROS +/-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Appui pendant 2 secondes environ :		
Défilement des programmes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume +/-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niveau CROS +/-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Appui pendant plus de 3 secondes :		
Activation/désactivation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

G = gauche, D = droite



Vous pouvez aussi utiliser une télécommande pour changer de programme d'écoute et ajuster le volume de votre aide auditive. Avec notre application smartphone, vous disposez d'encore plus d'options de contrôle.

Programmes d'écoute

1

2

3

4

5

6

Plus d'informations dans le paragraphe
« Changement de programme d'écoute ».

Bips sonores

Les bips du transmetteur CROS – semblables à ceux qui signalent la faible charge de la pile – sont envoyés à l'aide auditive.

Veillez demander à votre audioprothésiste de configurer les bips.

Manipulation de vos aides auditives

Insertion et retrait de l'émetteur

Des repères de couleur indiquent le côté :


- repère rouge = oreille droite
- repère bleu = oreille gauche




Insertion de l'appareil :

- Pour Sleeves, veillez à ce que le coude de Sleeve soit aligné sur le coude du câble de l'écouteur. Veuillez vous référer aux illustrations ci-dessous.

Correct :

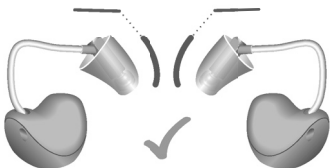


Incorrect :

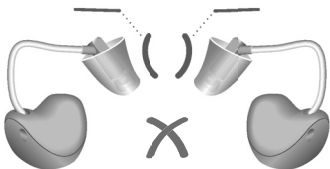

- ▶ Maintenez le câble de l'écouteur au niveau du coude le plus proche de l'embout.
- ▶ Introduisez l'embout avec précaution dans le conduit auditif ①.
- ▶ Tournez-le légèrement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Ouvrez puis fermez la bouche pour éviter une accumulation d'air dans le conduit auditif.

- ▶ Soulevez l'appareil et faites-le glisser au-dessus de votre oreille ②.

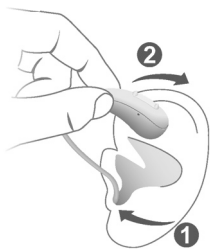

ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Portez toujours le câble de l'écouteur avec un embout.
- ▶ Vérifiez que l'embout est correctement fixé.



ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Introduisez doucement l'embout sans aller trop loin dans l'oreille.

i

- Il peut être utile d'insérer l'appareil de **droite** de la main **droite** et l'appareil de **gauche** de la main **gauche**.
- Si vous avez du mal à mettre l'embout en place, tirez doucement le lobe de votre oreille vers le bas avec votre autre main. Cela permet d'ouvrir le conduit auditif et facilite l'insertion de l'embout.

Le fouet de maintien proposé en option permet de bien retenir l'embout dans l'oreille. Pour fixer le fouet de maintien en option :

- ▶ Alignez l'extrémité du fouet de maintien avec l'extrémité plate de l'écouteur.



- Puis, enfoncez le fouet de maintien vers l'écouteur jusqu'à ce qu'il se clipse en place.




Pour placer le fouet de maintien :

- Pliez le fouet de maintien et placez-le soigneusement dans la conque (voir l'illustration).



Retrait de l'appareil :

- ▶ Soulevez l'appareil et faites-le glisser au-dessus de l'oreille ①.
- ▶ Si votre appareil est équipé d'une coque ou d'un embout sur mesure, retirez-le en tirant le fil d'extraction vers l'arrière de votre tête.
- ▶ Pour tous les autres embouts : veuillez tenir l'écouteur entre le pouce et l'index et le retirer avec précaution ②.

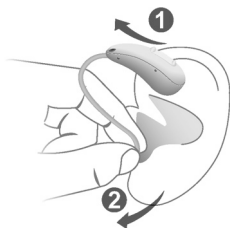

Ne tirez pas sur le câble de l'écouteur.



ATTENTION

Risque de blessure.

- ▶ Dans de très rares cas, l'embout peut rester dans votre oreille lorsque vous retirez l'appareil. Si cela vous arrive, faites retirer l'embout par un professionnel du secteur médical.

Nettoyez et séchez l'appareil après chaque utilisation.
Pour plus d'informations, consultez la section
« Maintenance et entretien ».

Mise en marche et arrêt

Vous disposez des options suivantes pour mettre votre appareil en marche ou l'arrêter.

Avec le chargeur :

- ▶ Mise en marche : Retirez l'appareil du chargeur.
Votre appareil auditif émet la mélodie de démarrage.
L'appareil auditif est paramétré avec le volume et le programme d'écoute **par défaut**.
- ▶ Arrêt : Placez l'appareil dans le chargeur.

Pour davantage d'informations, consultez le guide d'utilisation du chargeur.

Avec le rocker-switch :

- ▶ Mise en marche : Appuyez sur la partie inférieure du rocker-switch, et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre la mélodie de démarrage. Relâchez le rocker-switch pendant la mélodie.

L'appareil auditif est programmé avec le volume et le programme d'écoute **par défaut**.



- Arrêt : Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du rocker-switch, et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes. Une mélodie d'arrêt est diffusée.



Vous pouvez également consulter le guide d'utilisation du chargeur pour obtenir des conseils concernant la charge.

Passage en mode veille

Vous pouvez passer votre appareil en mode Veille, en utilisant une télécommande ou une application smartphone. Cela met l'appareil en sourdine. Quand vous quittez le mode Veille, l'aide auditive retrouve le volume et le programme d'écoute **précédemment** utilisés.

Remarque :

- En mode Veille, l'appareil n'est **pas** complètement éteint. Il consomme du courant.
Nous recommandons par conséquent de n'utiliser le mode Veille que pour une courte durée.
- Si vous souhaitez quitter le mode Veille, mais que vous n'avez ni la télécommande ni l'application à portée de main : éteignez votre appareil et rallumez-le (en utilisant le rocker-switch ou en le plaçant brièvement dans le chargeur jusqu'à ce qu'au moins un voyant vert s'allume). Dans ce cas, l'appareil utilise le volume et le programme d'écoute **par défaut**.

Changement de programme d'écoute

Votre appareil ajuste automatiquement le son à la situation d'écoute.

Il est possible que votre appareil dispose de plusieurs programmes d'écoute vous permettant de modifier le son, si nécessaire. Un signal sonore facultatif indique le changement de programme.

- Pour changer de programme d'écoute, appuyez brièvement sur le rocker-switch.

Veillez vous reporter au paragraphe « Boutons de commande » pour découvrir les réglages possibles du rocker-switch. Veillez vous reporter au paragraphe « Programmes d'écoute » pour découvrir la liste des programmes d'écoute.

Le volume par défaut est appliqué.

Bluetooth®

Votre dispositif est équipé de la technologie sans fil Bluetooth®* permettant le streaming audio depuis les téléphones portables et autres appareils compatibles.

Il est possible que l'utilisation de la fonction Bluetooth soit interdite à bord des avions, notamment durant le décollage et l'atterrissage. Si tel est le cas, vous pouvez désactiver Bluetooth la technologie sans fil de votre appareil via l'application smartphone.

* La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Leur utilisation par WS Audiology Denmark A/S se fait sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Charge

Trois options de chargeur sont à votre disposition :



1 Pure Charger

3 Pure Dry&Clean Charger

2 Pure Portable Charger

- ▶ Placez vos appareils auditifs dans le chargeur.
- ▶ Suivez les instructions contenues dans le guide d'utilisation du chargeur. Vous trouverez aussi des conseils utiles concernant la charge dans le guide d'utilisation du chargeur.

Témoin de faible charge

Votre appareil auditif émet un signal d'alerte lorsque la batterie rechargeable lithium-ion de l'émetteur devient trop faible. Le signal se répète toutes les 20 minutes.

En fonction de l'utilisation de vos aides auditives, vous disposez d'environ 1,5 h pour les charger avant qu'elles ne s'arrêtent de fonctionner.

Notez que l'autonomie de la batterie diminue si vous utilisez simultanément un grand nombre de fonctionnalités.

Maintenance et entretien

Pour prévenir tout dommage, il est important de prendre soin de l'appareil et de respecter quelques règles de base qui deviendront vite une habitude quotidienne.

Émetteur

Nettoyage

Votre appareil est doté d'un revêtement protecteur. Cependant, si vous ne nettoyez pas votre appareil régulièrement, cela peut provoquer des dommages ou des blessures.

- ▶ Nettoyez chaque jour votre appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- ▶ Il ne faut jamais nettoyer l'appareil à l'eau courante ou l'immerger dans l'eau.
- ▶ N'exercez aucune pression lors du nettoyage.
- ▶ N'utilisez pas de solvant à base d'alcool sur les contacts de charge.
- ▶ Afin d'éviter la corrosion, utilisez un chiffon doux et sec pour retirer la transpiration ou tout autre liquide présent sur le contact de charge ou l'appareil avant de les placer dans le chargeur.
- ▶ Adressez-vous à votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage et kits d'entretien spécifiques recommandés ainsi que sur la façon de maintenir votre appareil en bon état de marche.



Séchage

Vous pouvez utiliser des produits classiques pour sécher votre appareil. Demandez à votre audioprothésiste de vous recommander des produits de séchage et de vous fournir des instructions personnalisées pour le séchage de votre appareil.

Stockage

- Stockage à court terme (au maximum quelques jours) : Éteignez votre appareil en utilisant le rocker-switch, ou placez-le dans le chargeur sous tension.

Le chargeur doit être connecté à l'alimentation secteur. Si vous placez votre appareil dans le chargeur, alors que le chargeur n'est pas connecté à l'alimentation secteur, l'appareil ne s'éteint **pas**.

Veuillez noter que si vous éteignez l'appareil au moyen d'une télécommande ou d'une application smartphone, l'appareil ne s'éteint **pas** complètement. Il est en mode Veille et continue à consommer de l'énergie.

- Stockage à long terme (semaines, mois, etc.) : Chargez d'abord complètement votre appareil. Éteignez-le avec le rocker-switch, avant de le ranger. Nous recommandons d'utiliser des produits de séchage lors du stockage de l'appareil.

Vous devez charger l'appareil tous les 6 mois afin d'éviter une décharge complète et irrécupérable de la batterie rechargeable lithium-ion. Les batteries

qui se trouvent dans un état de décharge complète ne peuvent plus être chargées et doivent donc être remplacées. Par prudence, nous vous recommandons de recharger votre appareil en respectant une périodicité inférieure à 6 mois.

Conformez-vous aux conditions de stockage indiquées au paragraphe « Conditions d'utilisation, de transport et de stockage ».

Embouts


Nettoyage

Il peut y avoir un dépôt de cérumen (cire d'oreille) sur les embouts. Cela peut nuire à la qualité du son. Nettoyez les embouts quotidiennement.

Pour tous les types d'embouts :

- Immédiatement après l'avoir enlevé, nettoyez l'embout avec un chiffon doux et sec.


Cela évite que le cérumen sèche et durcisse.

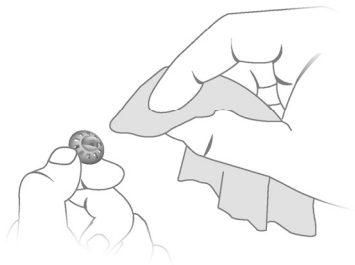


Remplacement

Remplacez les embouts standard tous les trois mois environ. Remplacez-les plus tôt si vous remarquez des fissures ou autres changements. La procédure de remplacement des embouts standard dépend du type d'embout. Au paragraphe « Composants », votre audioprothésiste a noté le type d'embout.

- Pour retirer l'ancien embout ou Sleeve, suivez l'illustration ci-dessous. Veillez à ne pas tirer sur le câble de l'écouteur.

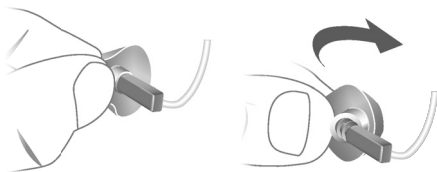

- Veillez tout particulièrement à ce que le nouvel embout ou le nouveau Sleeve couvre entièrement les anneaux de rétention du récepteur.
- Vérifiez que le nouvel embout ou le nouveau Sleeve est bien installé.

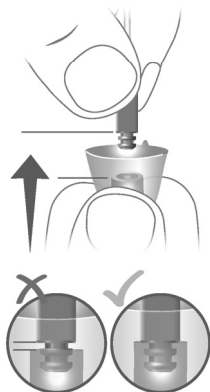

Maintenance effectuée par un professionnel

Votre audioprothésiste peut effectuer un nettoyage et une maintenance complets et professionnels.

Les embouts personnalisés et les filtres anti-cérumen doivent être remplacés par votre audioprothésiste, chaque fois que cela est nécessaire.

Demandez conseil à votre audioprothésiste en ce qui concerne la périodicité de la maintenance.

Autres informations

Accessoires

Vous pouvez utiliser l'application smartphone pour commander facilement à distance votre appareil. Cette application vous permet aussi de désactiver les bips sonores, de créer des profils sonores personnels et de nombreuses autres fonctions.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre audioprothésiste.

Explication des symboles

Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

Symboles figurant sur l'appareil ou l'emballage



Étiquette de conformité CE, confirme la conformité avec certaines directives européennes. Veuillez vous reporter au paragraphe « Informations relatives à la conformité ».



Label australien de conformité concernant la compatibilité électromagnétique et les radiocommunications. Veuillez vous reporter au paragraphe « Informations relatives à la conformité ».



Indique le fabricant légal de l'appareil.



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires. Plus d'informations dans le paragraphe « Informations relatives à la mise au rebut ».



Lire et observer les instructions du guide d'utilisation.



Dispositif médical

Conditions d'utilisation, de transport et de stockage

l'appareil fonctionne dans les conditions ambiantes suivantes (également applicables entre les utilisations) :

Conditions d'utilisation	Décharge	Charge
Température	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Humidité relative	5–93 %	5–93 %
Pression atmosphérique	700–1060 hPa	700–1060 hPa

En cas de transport ou de stockage s'étendant sur une période prolongée, veuillez respecter les conditions suivantes :

	Stockage	Transport
Température (recommandée)	10–25 °C (50–77 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Température (plage maximum)	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Humidité relative (recommandée)	20–80 %	5–90 %
Humidité relative (plage maximum)	10–80 %	5–90 %
Pression atmosphérique	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Veillez noter que vous devez charger l'appareil au moins tous les 6 mois. Par prudence, nous vous recommandons de charger l'appareil tous les 3 mois. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Maintenance et entretien ».

Les conditions peuvent être différentes pour d'autres pièces, par exemple le chargeur.



REMARQUE

Quand vous ne les utilisez pas, rangez vos appareils auditifs dans le boîtier en plastique ou le boîtier de charge fourni (le cas échéant) et tenez-les hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion pendant le transport.

- ▶ Expédiez les piles au lithium et les appareils auditifs conformément aux réglementations locales.

Informations relatives à la mise au rebut

- ▶ Pour éviter de polluer l'environnement, ne jetez pas les batteries ou les appareils avec les ordures ménagères.
- ▶ Recyclez ou éliminez les emballages, les batteries et les appareils conformément aux réglementations locales.

Dépannage

Problèmes et solutions possibles

L'appareil auditif émet des « bips sonores ».

- Chargez l'appareil.
 - Consultez le guide d'utilisation de votre aide auditive.
-

L'appareil ne fonctionne pas.

- Allumez l'appareil.
 - Chargez l'appareil. Observez aussi les voyants d'état du chargeur.
-


Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre audioprothésiste.

Informations relatives à la conformité

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux directives européennes suivantes :

- Règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Directive 2014/53/UE RED relative aux équipements radioélectriques
- Directive 2011/65/UE RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible ici : www.wsaud.com/signia.

La marque de conformité ACMA  confirme la conformité avec les normes relatives aux interférences électromagnétiques établies par l'Autorité australienne des médias et des communications (ACMA).

Les appareils sur lesquels est apposé le marquage FCC sont conformes aux normes de la FCC concernant les interférences électromagnétiques.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC et aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux valeurs limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner de l'énergie

radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, peut produire des interférences nuisibles aux liaisons radio. Cependant, rien ne garantit que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec des récepteurs de radio ou télévision, lesquelles peuvent être déterminées par l'arrêt et la remise en marche de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de les corriger par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

FCC attention : tout changement ou modification sans être expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Informations spécifiques au pays

États-Unis et Canada

Information relatives à la certification des appareils disposant d'une connectivité sans fil :

CROS Pure C&G AX

- HVIN : RFM003
- Contient l'ID FCC : 2AXDT-RFM003
- Contient l'ID IC : 26428-RFM003

Consignes générales de sécurité

Batterie rechargeable lithium-ion



AVERTISSEMENT

Une batterie rechargeable lithium-ion est intégrée en permanence à votre appareil. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut faire dégazer la batterie rechargeable lithium-ion.

Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- ▶ En ce qui concerne la batterie rechargeable lithium ion, suivez les consignes de sécurité indiquées dans ce paragraphe.



AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique !

- ▶ Branchez le chargeur uniquement à une alimentation USB conforme aux normes IEC 60950-1 et/ou IEC 62368-1.



AVERTISSEMENT

- ▶ Conformez-vous aux conditions d'utilisation.
- ▶ Veillez particulièrement à protéger votre appareil d'une chaleur extrême (due par exemple à un feu, un four à micro-ondes, un four à induction ou d'autres champs à forte induction) et de la lumière du soleil.
- ▶ Chargez vos appareils auditifs en utilisant exclusivement le chargeur homologué. Faites appel à votre audioprothésiste qui vous conseillera.
- ▶ Ne désassemblez pas l'appareil.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives.
- ▶ N'utilisez pas des appareils déformés ou manifestement endommagés.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil si ses performances après la charge diminuent de façon considérable. Rapportez l'appareil à votre audioprothésiste.
- ▶ N'éliminez pas l'appareil en le brûlant ou en le jetant dans l'eau.



AVERTISSEMENT

- ▶ Le remplacement et la réparation doivent être effectués par un professionnel. Par conséquent :
- ▶ Ne réparez ni ne remplacez vous-même la pile rechargeable lithium-ion.
- ▶ Dans le cas (improbable) où une pile rechargeable exploserait, éloignez tous les matériaux combustibles.

Si l'un des cas mentionnés ci-dessus se produit, rappez votre appareil à votre audioprothésiste.

Sécurité des personnes



AVERTISSEMENT

Risque de perturbation des équipements électroniques !

- ▶ Dans les zones où des restrictions d'utilisation d'appareils électroniques ou sans fil sont en vigueur, vérifiez si vous devez éteindre votre appareil.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure.

- ▶ N'utilisez pas un appareil qui paraît endommagé, renvoyez-le au point de vente.



AVERTISSEMENT

Veillez noter que toute modification non autorisée de ce produit peut l'endommager ou causer des blessures.

- ▶ N'utilisez que les pièces et accessoires agréés. Faites appel à votre audioprothésiste qui vous conseillera.



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement !

Votre appareil contient des petites pièces susceptibles d'être avalées.

- ▶ Tenez les aides auditives, les batteries et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes handicapées mentales.
- ▶ En cas d'ingestion des pièces, consultez un médecin ou rendez vous immédiatement à l'hôpital.



AVERTISSEMENT

En cas d'ingestion de la batterie, contactez la « Poisons Information Hotline » au 13 11 26 pour l'Australie et au 0800 764 766 pour la Nouvelle-Zélande. Pour les autres pays, veuillez contacter le centre antipoison le plus proche.



AVERTISSEMENT

Votre appareil peut réduire certains bruits de fond et potentiellement aussi les bruits de circulation et les signaux sonores d'avertissement.



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !

- ▶ N'utilisez pas votre appareil dans des atmosphères explosives (par ex. sur des sites miniers).

Contre-indications



AVERTISSEMENT

Consultez un audioprothésiste si vous ressentez des effets secondaires inhabituels tels qu'une irritation cutanée, qu'une accumulation excessive de cérumen, vertiges, modifications de l'audition, ou si vous pensez qu'il peut y avoir un objet étranger dans votre conduit auditif.



AVERTISSEMENT

En cas d'allergie de contact connue, consultez avant utilisation le fabricant de l'aide auditive au sujet de la présence de l'allergène. Si une réaction allergique se développe après le port de l'aide auditive, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin agréé.



AVERTISSEMENT

Un audioprothésiste devrait conseiller à l'utilisateur potentiel d'un appareil de consulter un médecin diplômé avant d'utiliser cet appareil, si l'audioprothésiste détermine que l'utilisateur potentiel présente l'un des symptômes ou antécédents médicaux suivants :

- ▶ Déformation congénitale ou traumatique visible de l'oreille.
- ▶ Antécédent de drainage actif de l'oreille dans les trois derniers mois.
- ▶ Antécédent de perte auditive soudaine ou d'une détérioration progressive rapide dans les trois derniers mois.
- ▶ Vertiges aigus ou chroniques.
- ▶ Perte auditive unilatérale d'apparition soudaine ou récente dans les trois derniers mois.
- ▶ Différence audiométrique air-os supérieure ou égale à 15 dB à 500 Hz, 1 000 Hz et 2 000 Hz.
- ▶ Preuve visible d'accumulation significative de cérumen ou d'un corps étranger dans le conduit auditif.
- ▶ Douleur ou inconfort dans l'oreille.

Sécurité du produit



REMARQUE

- ▶ Protégez vos appareils de la chaleur extrême. Ne les exposez pas aux rayons directs du soleil.



REMARQUE

- ▶ Ne mettez pas vos appareils dans le four à micro-ondes.



REMARQUE

Différents types de fortes radiations, par ex. lors d'examens radiologiques ou IRM de la tête, peuvent endommager les appareils.

- ▶ N'utilisez pas les appareils durant ces examens ou autres procédures similaires.

Les radiations plus faibles comme celles de l'équipement radio ou de la sécurité aéroportuaire n'altèrent pas les appareils.



REMARQUE

- ▶ Protégez vos appareils de la forte humidité. Ne les portez pas sous la douche ni lorsque vous utilisez des produits cosmétiques, du parfum, de l'après-rasage, de la laque ou de la lotion solaire.



Certains pays imposent des restrictions à l'utilisation d'un équipement sans fil.

- ▶ Renseignez-vous auprès des administrations locales.



REMARQUE

Vos appareils sont conçus en conformité avec les normes internationales relatives à la compatibilité électromagnétique, mais des interférences peuvent se produire avec des appareils électroniques situés à proximité. Dans ce cas, éloignez-vous de la source d'interférences.

Entretien et garantie

Numéros de série

Gauche :

Droite :

Dates d'entretien

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Date d'achat :

Durée de garantie (en mois) :

Votre audioprothésiste

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.



 **Fabricant légal**

WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Danemark

Document No. 04578-99T01-7700 FR
Order/Item No. 210 039 09
Master Rev01, 02.2021
© 03.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.signia.net