

# Styletto

Guide à l'attention des audioprothésistes



# Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Avant et après l'appareillage</b>	<b>4</b>
Assemblage	4
Activer	4
Charge	5
Connexion	5
Noter le numéro de série	5
<b>Dépannage</b>	<b>6</b>
Remplacement du dispositif anti-cérumen	6
<b>Autres informations</b>	<b>7</b>
Périodes de stockage	7
Symboles utilisés dans ce document	7

# Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur les aides auditives équipées de batteries (batteries lithium-ion) intégrées de façon permanente.



## **ATTENTION**

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.

# Avant et après l'appareillage

Avant de commencer l'appareillage, vous devez préparer les aides auditives.

## Assemblage

- ▶ À la livraison, chaque aide auditive contient une batterie.  
Il n'y a pas besoin d'introduire une batterie.
- ▶ L'écouteur est fixé de façon permanente à l'aide auditive. L'installation d'un écouteur est inutile.

## Activer

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, vous devez activer les aides auditives. Placez les aides auditives dans le chargeur (si elles n'y sont pas déjà) et appuyez sur le bouton du chargeur jusqu'à ce que le premier voyant vert s'allume.

Remarque :

- Les aides auditives qui sont activées, mais **inutilisées**, peuvent se décharger plus vite que des aides auditives qui n'ont **pas** été activées. Par conséquent, n'activez les aides auditives qu'avant la première utilisation ou le premier appareillage.

## Charge

Chargez les aides auditives pendant au moins 15 minutes avant la réalisation du premier appareillage.

Effectuez une charge complète des aides auditives avant la livraison au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.

Conformez-vous aux conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'aide auditive et du chargeur.

## Connexion

Utilisez ConnexxAir pour ajuster sans fil les aides auditives.

## Noter le numéro de série

Le numéro de série est imprimé sur le boîtier.




# Dépannage

Avant d'envoyer une aide auditive à notre adresse de service après-vente, effectuez un contrôle visuel pour voir si l'écouteur est bloqué par du cérumen. Si tel est le cas, remplacez le dispositif anti-cérumen.

## Remplacement du dispositif anti-cérumen

- ▶ Retirez l'embout.
- ▶ Vissez l'extrémité fileté de l'outil de remplacement du dispositif anti-cérumen sur le filtre de l'écouteur externe.
- ▶ Enlevez le filtre usagé.
- ▶ Retournez l'outil et mettez en place le nouveau dispositif anti-cérumen en exerçant une poussée.
- ▶ Dégagez le filtre en inclinant l'outil de remplacement sur le côté. Vous pouvez alors jeter l'outil de remplacement.

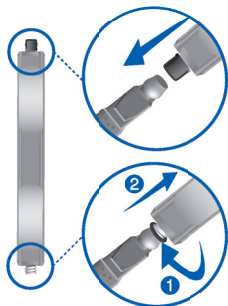

# Autres informations

## Périodes de stockage

Les aides auditives inutilisées se déchargent. Respectez les périodes de stockage suivantes, pour éviter une décharge complète :

- Les aides auditives qui n'ont pas été activées ou utilisées peuvent être stockées jusqu'à 12 mois après la date de fabrication. La date de fabrication est imprimée sur l'étiquette apposée sur l'emballage de l'aide auditive.
- Une fois activée, l'aide auditive doit être chargée au moins tous les 6 mois pour rester en bon état.

## Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

---

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

 **Fabricant légal**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
D-91058 Erlangen  
Allemagne  
Tél. +49 9131 308 0  
[www.signia-audition.fr](http://www.signia-audition.fr)  
[www.signia-hearing.can](http://www.signia-hearing.can)  
[www.signia-hearing.ch](http://www.signia-hearing.ch)



Document No. 03640-99T02-7700 FR  
Order/Item No. 109 605 00  
Master Rev01, 06.2018  
© 07.2018, Signia GmbH. All rights reserved



0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**