

1. ご使用の前に

- ① ConnexxLink 背面に充電電池とネックループを嵌めます。
(ネックループは補聴器と通信用のアンテナ)
- ② 付属の電源アダプターと日本用の電源プラグをパチンというまで嵌めます。
- ③ 電源アダプターを、直接 ConnexxLink に挿します。あるいはクレードルの背面「POWER」に挿し、クレードルに ConnexxLink をしっかり挿します。
- ④ 約 5 時間のフル充電で約 6 時間使えます。



【ご注意】:

- 充電電池は仮充電済みで出荷していますが、フル充電してからご使用ください。
- 充電電池は消耗品です。使用時間が短くなったときは交換してください。
- AC アダプタは 100V ~ 240V 対応です。海外では現地のプラグ形式や電圧をご確認の上、付属のプラグを付け替えてお使いください。
- 付属の USB ケーブルで PC から直に充電できます。充電時間は PC により異なります。PC ~ クレードル経由で充電する時はクレードル背面の「POWER」に繋いでください。「USB」は使いません。
- 電池ボタン (ネックループ付) は固いのでコイン等で開けてください。

2. ご使用方法

- ① ブルートゥーススティックを PC に挿します。ポートは USB 2 でも USB 3 でも構いません。中の緑色 LED が点滅します。
- ② 電源オン: ConnexxLink 表面中央のボタンを押します。ディスプレイのブルートゥースマークが点滅 → 点灯になります。
- ③ ConnexxLink をお客様の首に掛けます。
- ④ これで準備完了です。
以降は中面の「ConnexxLink の使い方」をご覧ください。

- ⑤ 電源オフ: ConnexxLink 表面中央のボタンを押します。

【ご注意】:

- ネックループの端子はしっかり押し込んでください。
- 補聴器との通信距離は 25cm です。
- 充電中は調整できません。調整には充電器を外してください。
- ミニテック、イージーテック等のリモコンはすべて首から外し使わないでください。リモコンと ConnexxLink が混信する場合があります。なお、リモコンを PC に USB 接続してリモコンの設定をすることは構いません。
- 金属製ネックレスや磁気ネックレスが通信を妨害する場合があります。ネックレスを外してご使用ください。



3. ディスプレイの表示

■ 電池残量

充電中

充電完了



■ 動作中



節電のため消灯することがありますが操作すると点灯します。

■ 補聴器と通信中



■ 補聴器通信エラー



■ ブルートゥース 接続完了 (点灯) 検出中 (点滅)



ブルートゥース接続が 1 時間ないと自動で電源オフします。

4. 故障かな?と思ったら

- 充電されてますか
- 充電中ではありませんか
- ブルートゥーススティックは中の緑色 LED が点灯していますか
- お客様の首に掛けて使っていますか
- ネックループのコネクターはしっかり接続されていますか
- 電磁波の影響で通信エラーマークが出ることがあります
ミニテック、イージーテック等のリモコンもお客様の首に掛けていませんか
蛍光灯やパソコンに近づきすぎていませんか (20cm 以内)
金属製ネックレスや磁気ネックレスを掛けていませんか
- 補聴器の電池は十分ですか
- 補聴器はワイヤレス機能付きですか (Sirion 耳かけ型は例外的に可能)
- 補聴器が離れていませんか
補聴器との通信距離は 25cm です。電池交換等で補聴器が離れると「通信範囲にある補聴器」の表示が出ます。補聴器を装着し「再検出」すると自動で再接続して調整を続行できます。
- ブルートゥーススティックから 10m 以上離れていませんか
ブルートゥース接続は 10m を超えると切れますが 10m 圏に戻ると自動再接続します。Connexx の「Programmer not found」の表示は「OK」で閉じます。(2 度出ることもあり)
再度補聴器を検出すると調整を続行できます。

ConnexxLink 取扱説明書

SIEMENS



1. ConnexxLinkをお客様の首に掛けて

電源を入れます。



【注】：ネックレスやお客様のリモコンは首から外してください。(イージータック、ミニテック等)

2. ユーザー設定 > プログラマーで



ConnexxLinkに を入れます。フォームウェアは4.0です。



フォームウェアバージョン
(変更後はConnexxを再起動してください)
 ConnexxLink v3.5
 ConnexxLink v4.0

3. 右上のプログラマー選択で

ConnexxLinkを選びます。
(この作業は次からは不要です)

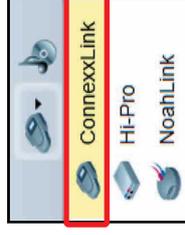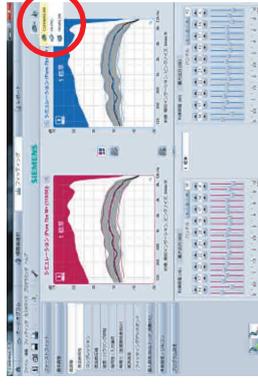

5. 左右の設定

を押すと補聴器からメロディーが出ます。お客様に聞こえた側を確認して右/左をクリックします。マウスを離すと●が現れます。

【例】：上の で右耳にメロディーが聞こえた下の で左耳に聞こえた場合



片耳でも両耳でも必ず押して左右を確認

6. ご注意

検出直後の●は装用耳と逆だったり他のデモ器を検出している場合があります。必ず で装用耳を確認してください。

【X】：検出直後に逆だったら




【O】：正しく入れ直す



4. で補聴器を検出します。

OKで進みます。

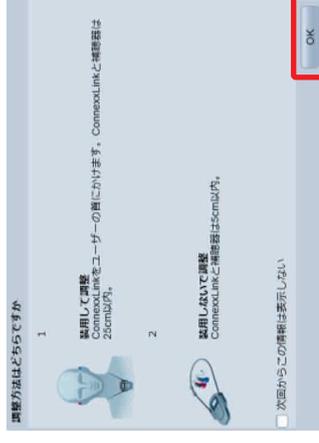

補聴器と通信中

8. 万一 通信エラーが起きたら

ミニテック、イージータック等のリモコンやネックレスを首に掛けていたり蛍光灯やパソコンに近づきすぎていると(20cm以内)、電磁波の影響で通信エラーマークが出る可能性があります。

【万一、通信エラーが起きたら】

通信エラーマークが出たら蛍光灯やPCから20cm以上離れてください。他のリモコンやネックレスは首から外してください。



Connexx7 画面にも通信エラーが出ますが補聴器を再検出すると調整を続けることができます。

再検出

1. ConnexxLinkをお客様の首に掛けて

電源を入れます。



【注】：ネックレスやお客様のリモコンは首から外してください。
(ミニテック、イージーポケット等)

2. 補聴器を検出します。

ConnexxLinkを選びます。



3. もし左の画面が出ない場合は

設定 > 装置でConnexxLinkに☑を入れてから再度読み取ります。
(この作業は次からは不要です)



4. 進むをクリックします。



補聴器と通信中



5. 左右の選択 [片耳装用の場合]

☑を押すと補聴器からメロディーが出ます。お客様に聞こえた側を確認してR/Lをクリックします。

【例】：上の☑で右耳にメロディーが聞こえた下の☑で左耳に聞こえた場合



片耳でも両耳でも必ず押して左右を確認


6. 左右の設定 [両耳装用の場合]

検出直後の☑は装用耳と逆だったり他のデバイスを検出している場合があります。必ず☑で装用耳を確認してください。


【X】：検出直後に逆だったら



【O】：RLを押してクリアして正しく入れ直す

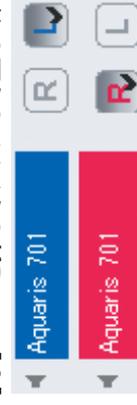

7. 調整に進みます。

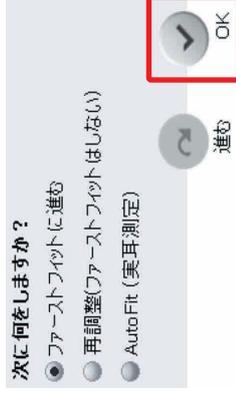

8. 万一 通信エラーが起きたら

ミニテック等のリモコンやネックレスを首に掛けていたり蛍光灯やパソコンに近づきすぎていると(20cm以内)、電磁波の影響で通信エラーマークが出る場合があります。

【万一、通信エラーが起きたら】

通信エラーマークが出たら蛍光灯やPCから20cm以上離れてください。他のリモコンやネックレスは首から外してください。

Connexx6画面にも接続エラーが出ますが「最後のアクション」で続行します。

何をしますか？



最後のアクションを繰り返す

もしくは補聴器を再検出します。



5. 付属品

- ① ConnexLink 本体 × 1
- ② ブルートゥーススティック × 1
- ③ USB ケーブル × 1
- ④ 充電電池 × 1★
- ⑤ ネックループ × 1★
- ⑥ AC アダプタ、各プラグ × 1★
- ⑦ 充電用クレードル × 1★



★はメンテナンス用に別売品も用意しています。

6. アフターサービスについて

■ 保証書（別添）

保証書は大切に保管してください。

■ 保証期間中に修理を依頼される時

恐れ入りますが、保証書を添えて弊社までお送りください。

保証書の記載内容に従って、修理いたします。保証書の提示がないときは有料修理になります。

■ 保証期間経過後の修理について

修理により製品の機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

■ 部品の保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後4年間です。

7. 安全上のご注意（必ずお守りください）

⊘ 禁止

- 改造、分解をおこなわないでください。
- 付属の電源アダプタ、クレードル以外はお使用にならないでください。
- 強い衝撃を与えたり、ぶつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になるところに置かないでください。
- ConnexLink も充電電池も濡したり湿度のあるところに持ち込まないでください。
- 汚れを拭き取る時は、アルコールやベンジンを使用しないでください。柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。
- 電磁波の発生するところから離れてください。電子レンジで乾燥させないでください。
- レントゲンやMRIなどの放射線は、故障の原因になります。検査室に持ち込まないでください。

⚠ 警告

- 心臓ペースメーカーを使用している方には使用しないでください。
- 破損したら使用を止めてください。感電する危険があります。
- 測定装置や電子機器に干渉する恐れがあります。病院や飛行機では電源をお切りください。
- ネックループが首に巻きつくこと窒息の危険を伴います。周囲の物に十分注意してください。12歳以下の子供には使用しないでください。
- 小さな子供やペットが触れるところに置かないでください。誤って飲み込んだときはあわてず、医師、救急医療センター等に相談してください。
- 引火性の強い場所や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
- 充電する際は、周囲の温度が0℃～45℃の場所で行ってください。

⚠ 注意

- 取扱説明書に従い補聴器の調整目的にのみお使いください。
- 水による故障は保証外ですので有料修理になります。修理できないこともありますのでご了承願います。
- ラジオ・テレビの放送所の近くや、すぐ近くで電子レンジ・IHクッキングヒーター・タクシー無線などを使用していると、放送が聞こえたり、雑音が入ったりすることがあります。故障ではありません。補聴器をとりはずすか、その場所から離れてください。
- 補聴器のテレコイルが有効になっているとき ConnexLink を用いるとツブツブという雑音聞こえることがあります。ConnexLink を補聴器から10cm以上離してください。
- 充電電池の使用時間は、使用環境や充電電池の劣化度により異なります。
- 電源が入らないほど充電電池を消費した状態で保管しないでください。充電電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
- ご不要になったら自治体指定の方法で処分してください。

製造販売業者名：シバントス株式会社

住所：〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-15

TEL 0800-222-4133 FAX 0800-888-4133

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。

その場合は、下記番号までお問合せください。

TEL 042-765-7211 FAX 042-765-7237

Manufactured by

Sivantos GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Germany

under Trademark License of Siemens AG