


# Quickguide til StreamLine Mic.

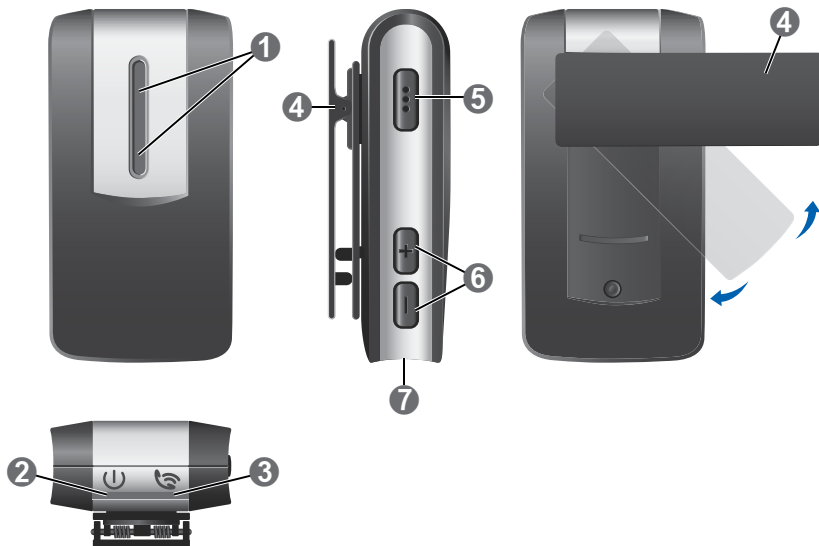

## Komponenter

- ❶ Mikrofoner
- ❷ Strømindikator
- ❸ Statusindikator
- ❹ Klemme (roterende)
- ❺ Multifunksjonsknapp
- ❻ Volumknapper og
- ❼ USB-port for lading

## Paring opp mot høreapparat




1. Slå høreapparat av og på.
2. Slå på StreamLine Mic ved å holde multifunksjonsknappen inne i 3 sekunder.
3. Strømindikatoren lyser grønt .
4. StreamLine Mic og høreapparat må plasseres maks 20 cm fra hverandre.
5. Statusindikatoren blinker gult .
6. Paring opprettes automatisk.
7. Paringen er ferdig når statusindikatoren lyser gult .
8. Paring er permanent og må kun utføres én gang.

## Paring opp mot telefon


1. Slå på Bluetooth på telefonen (via innstillinger)
2. Hold inne multifunksjonsknappen og samtidig, helt til statusindikatoren blinker blått .
3. Dette tar ca 6 sekunder, og StreamLine Mic står i paringsmodus i 3 minutter.
4. Velg «StreamLine Mic» i Bluetooth-menyen på telefonen og koble til.
5. Tilkobling vil da opprettes og statusindikatoren lyser fast blått .

# StreamLine Mic kan brukes som ekstern mikrofon.


## Slå på ekstern mikrofon

1. Trykk på multifunksjonsknappen  i omtrent 3 sekunder. Statusindikatoren  lyser lilla . En bekreftelsestone spilles av i høreapparatene.
2. Den eksterne mikrofonen er slått på. Tale fra personen som bruker StreamLine Mic, streames direkte til høreapparatene.

Taleren må bruke StreamLine Mic som illustrert på bildene for å oppnå best mulig ytelse. Maksimal avstand: Høreapparater - StreamLine Mic: 20 m (66 ft).

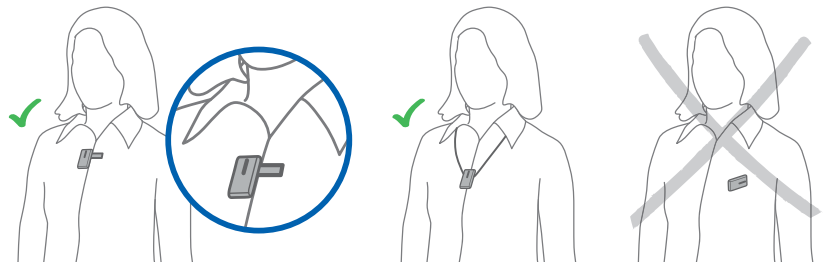


## Slå av ekstern mikrofon

1. Hold multifunksjonsknappen  nede i cirka tre sekunder.

**NB!** Når StreamLine Mic brukes som ekstern mikrofon, er det ingen forbindelse til smarttelfonen. F.eks. innkommende anrop vil ikke indikeres.

# Pare høreapparatene med StreamLine TV.

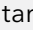1. Koble StreamLine TV til strøm.
2. Koble StreamLine TV til TV-en med TOSLINK-kabelen (a) eller RCA-kabelen (b).
3. Slå av og på høreapparatene.
4. Plasser høreapparatene oppå StreamLine TV.
5. Paringen starter automatisk: LED-indikatorene lyser blått  i ca. 30 sekunder og indikerer at de pares.
6. Paring er fullført.
7. Streamingen kan aktiveres på flere måter: Via app, trykknapp på høreapparat eller via fjernkontroll.

